

# Varussell



## Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## 1. Aufbau- und Bedienung des Varussell

### 1.1 Aufbau

**Schritt 1:** Nehmen Sie das Varussell und stellen sie es auf dem Boden ab.

**Schritt 2:** Mit der aufgesetzten roten Kunststoff-Flügelmutter lösen Sie die Winkelfixierung (a) und die Bremsschraube (b) unter der Drehscheibe (siehe Abb. 1) durch Drehungen entgegen dem Uhrzeigersinn.

Das Gerät ist nun betriebsbereit! Für bestimmte Anwendungsbereiche (z. B. Übungen im Stehen) ist es sinnvoll die Scheibe zu bremsen. Für Lagerung und Transport kann es ratsam sein die Bremse voll anzuziehen. (Abb. 1, b – Drehung der Flügelmuttern im Uhrzeigersinn).

**Schritt 3:** Einstellen des Neigungswinkels: Die Schrägstellung der Scheibe erfolgt in unbelastetem Zustand über ein Handrad (Abb. 2). Eine geeichte Winkeleinstellung ermöglicht die exakte Wahl eines Neigungswinkels zwischen 0-10 Grad. Mittels der Winkelfixierungsschraube (Abb. 1, a) sollte der vorher gewählte Winkel, zur Schonung des Schwenklagers, fixiert werden. Im therapeutischen Alltag schützt es vor Winkelverstellungen durch Kinder oder Patienten.

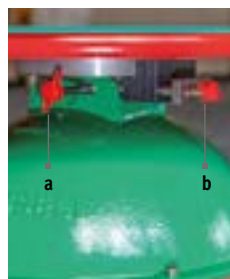


Abb. 1



Abb.2

### 1.2 Die Befestigung des Liegebrettes (siehe Sonderzubehör)

**Schritt 1:** Legen sie das Liegebrett so auf das Varussell, dass sich die 4 Löcher des Bretts mit den Schraubgewindeeinsätzen in der Varussellscheibe decken.

**Schritt 2:** Nehmen sie die 8 mm Senkschrauben\* und ziehen Sie sie mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel an. (Abb.3) Das Liegebrett ist nun auf dem Varussell befestigt und einsatzbereit. Die Winkelverstellung ist auch mit aufgeschraubten Liegebrett nutzbar.

## 1.3 Befestigung der Vergrößerung (siehe Sonderzubehör)

### 1.3.1 Nutzung als Drehscheibenvergrößerung:

**Schritt 1:** Legen sie die Vergrößerung so auf das Varussell, daß sich die 4 Löcher des Bretts mit den Schraubgewindeeinsätzen in der Varussellscheibe decken.

**Schritt 2:** Nehmen Sie die Zylinderschrauben\* mit Innensechskant und ziehen Sie sie mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel an (vgl. Abb. 3).

Das Varussell mit vergrößerter Drehscheibe ist nun einsatzbereit. Die Winkelverstellung ist auch mit aufgeschraubter Vergrößerungsscheibe nutzbar.

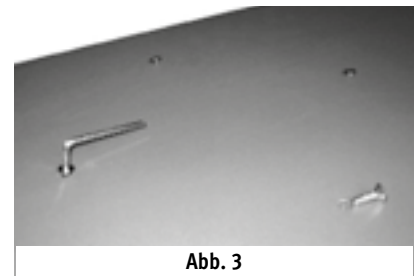


Abb. 3

### 1.3.2 Nutzung als Standflächenvergrößerung:

**Schritt 1:** Legen Sie die Vergrößerungsscheibe auf den Boden.

**Schritt 2:** Stellen Sie das Varussell so auf die Scheibe, dass sich die vier Löcher in der Bodenplatte genau mit den vier Gewindeeinsätzen in der Vergrößerungsscheibe decken.

**Schritt 3:** Stecken sie die 6 mm Zylinderschrauben\* durch die Bohrungen der Grundplatte und schrauben Sie sie in die Gewinde in der Vergrößerungsscheibe (Abb. 4).

Das Varussell mit Standflächenvergrößerung ist nun einsatzbereit.

Achtung: Sonderzubehör, bitte separat bestellen.



Abb. 4

\* Gleich bestellen: Art.Nr. 1842904 (siehe Sonderzubehör)



## Varussell Sonderzubehör

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Varussell mit diesem Sonderzubehör:

### Sport-Thieme Liegebrett Varussell

Das Liegebrett bietet Platz für zwei Personen in ausgestreckter Sitzhaltung, z. B. für Therapeut und Kind, oder für ein ausgestreckt liegendes Kind. LxB: 120x60 cm. **Art.Nr. 1281806**

(zusätzlich sollten Sie als Kippsicherung die Vergrößerungsscheibe mitbestellen).



### Sport-Thieme Vergrößerungsscheibe Varussell

Die Vergrößerungsscheibe (ø 60 cm) lässt sich oben oder unten am Varussell befestigen. Oben angebracht ist die lackierte Holzscheibe eine ideale Vergrößerung der Sitzfläche, unter dem Varussell montiert dient sie als Kippsicherung beim Einsatz des Liegebretts. **Art.Nr. 1281907**

### Sport-Thieme Vergrößerungs-Set Varussell

Ideale Erweiterung des Varussells in der Therapie. So können bis zu 2 Personen sitzend oder liegend das Varussell nutzen. Das Set besteht aus:

- Liegebrett 120x60 cm
- Vergrößerungsscheibe ø 60 cm

**Art.Nr. 1281819**



Vergrößerungsscheibe



Liegebrett

### Befestigungssatz Varussell

Kompletter Schraubensatz zur Befestigung von Varussell-Zubehörteilen.



**Art.Nr. 1842904**

Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel, die Farbgebung kann abweichen.