

DATENBLATT**Dermafreezer Set**

Für die schnelle und effektive Entfernung von Warzen oder anderen gutartigen Läsionen. Das speziell für den professionellen Bereich entwickelte Dermafreezer-Set, erlaubt die Behandlung von gutartigen Läsionen bei Patienten ab 4 Jahren. Geeignet u.a. für Hand- und Fußwarzen, Genitalwarzen, Stielwarzen, Dellwarzen, aber auch für Alters- oder Pigmentflecken. Das Aerosol besteht aus einem Gemisch von Dimethylether mit Propan/Isobutan.

- Kryochirurgisches System für die unkomplizierte und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen
- Trennung von Applikator und Druckdose zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Kompakte Größe, einfache und sichere Handhabung
- Schmerzarme und unblutige Behandlung
- Eignet sich für Dermatologen, Allgemeinmediziner, Chirurgen, und Kinderärzte
- Kompakte Aerosolflasche mit 170 ml für ca. 60 Anwendungen je 30 Tips für kleine (2 mm) und größere (5 mm) Areale
-

Nur von medizinischem Fachpersonal zu verwenden. Schnelle und effektive Entfernung von Läsionen bei Ihrem Patienten. Behandelt mehrere Läsionen bei Ihrem Patienten in 15 - 40 Sekunden Die Behandlungszeit der Läsionen kann je nach Läsionstyp unterschiedlich sein. Informationen zu den Behandlungszeiten pro Läsion entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Während oder unmittelbar nach der Behandlung kann ein leichtes Brennen oder ein stechendes Gefühl auftreten, das aber nach kurzer Zeit verschwindet. In einigen Fällen können sich nach einigen Tagen Blasen bilden. In diesem Fall ist es wichtig, die Blase nicht zu durchstechen, sondern mit einem Pflaster abzudecken. Informieren Sie Ihren Patienten vor der Behandlung, was er während und nach der Behandlung bezüglich Nachsorge und möglichen Nebenwirkungen zu erwarten hat! Bei Bedarf kann die Behandlung nach 2 Wochen wiederholt werden.

Rückgabebedingungen

Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Lieferumfang

- 1 Aerosolflasche mit Sprühkopf
- 20 Stück Applikatoren spitz
- 30 Stück Applikatoren rund
- Gebrauchsinformationen

Hinweise

Gefahrenhinweise

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.

H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 - Aerosol nicht einatmen.

P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusätzliche Hinweise

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

DATENBLATT

Dermafreezer Set

Typ	PZN	REF	VE
Dermafreezer Set, Flasche 170 ml inkl. jeweils 30 Stück Applikatoren Typ rund & spitz	19124561	H7 80003	1 Pack.

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>