

Haut schützen – Wundheilung unterstützen

Alles klar!



Transparenz & Absorption

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Die Wunde stets im Blick!

Vertrieb durch:



**FRESENIUS
KABI**

Eine neue Generation der Wundverbände

3M™ Tegaderm™ Absorbent verbindet die absorbierenden Eigenschaften eines hydroaktiven Wundverbandes mit dem besonderen Vorteil der Transparenz – für kontrollierte Wundbeobachtung ohne Verbandwechsel.

- **Besondere Transparenz**

Das transparente Material ermöglicht eine ständige Wundbeobachtung und -kontrolle ohne Verbandwechsel.

- **Effiziente Absorption**

Deutlich höhere Absorptionsfähigkeit als die meisten Hydrokolloidverbände durch das innovative Wirkprinzip.

- **Dünnere und glatter Kleberand**

Guter und sicherer Halt des Verbandes auch an schwierigen Körperstellen und bei stärkeren Scherkräften, wie z. B. in der Sakralregion.

- **Unbegrenzte Tragedauer**

Kann länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben und gewährleistet ein idealfeuchtes Wundmilieu und Wundruhe.

- **Wirtschaftlich in der Anwendung**

Spart Materialkosten und Arbeitszeit für den Anwender.

Transparenz &



Klinische Beispiele

Chronische Wunden: Dekubitus¹



Behandlungsbeginn:
Wundgröße = 0,96 cm²



Angelegter Tegaderm Absorbent
Verband (sakral)



Woche 1:
Wundgröße = 0,32 cm²



Woche 5:
Wunde geschlossen

Akute Wunden: Hautablederung²



Behandlungsbeginn:
Dialysepflichtiger Patient, 74 Jahre



Angelegter Tegaderm Absorbent
Verband (oval) nach 5 Tagen



Verbandwechsel am 10. Tag



Nach etwa 30 Tagen:
Wunde geschlossen

Indikationen

3M™ Tegaderm™ Absorbent wird angewendet bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation wie beispielsweise Hautulcera im Stadium I und II, Abschürfungen, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Spendehaut-Entnahmestellen, postoperative Wunden.

Absorption

Tipps & Tricks zur Anwendung

Allgemeine Hinweise

- Wählen Sie die Verbände so aus, dass das Acryl-Polymerkissen die intakte Haut um mindestens 1 cm überlappt.
- Der Verband kann länger als 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Ein Verbandwechsel wird empfohlen, wenn der Wundzustand dieses erfordert oder der Verband sich löst.
- Die Acryl-Polymeraufgabe darf nicht zerschnitten werden.
- Um die wundumgebende Haut vor Exsudat zu schützen, kann 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz als zuverlässiger, atmungsaktiver Langzeitbarriere-Film aufgetragen werden.

Sakralapplikation mit sicherem Halt



1. Die Haut muss trocken und fettfrei sein. Falten Sie den Verband in der Mitte.



2. Halten Sie den gefalteten Verband an den klebstofffreien Laschen und entfernen Sie das Trägerpapier.



3. Die Transparenz ermöglicht eine exakte Positionierung über der Wunde.



4. Platzieren Sie den Verband im steilen Winkel zuerst mittig in der Analfalte.



5. Modellieren Sie den Verband von der Mitte nach außen an.



6. Halten Sie den Kleberand ca. 10-15 Sekunden gedrückt, um die Klebkraft zu optimieren.



7. Ziehen Sie den Applikationsrahmen flach nach außen ab und streichen Sie die Kleberänder abschließend an.



8. Angelegter Tegaderm Absorbent Sakralverband.




9. Zur Entfernung überdehnen Sie den transparenten Kleberand waagrecht zur Haut und unterstützen Sie diese dabei mit leichtem Druck. Alternativ kann der Verband auch vorsichtig und flach abgezogen werden.



3M™ Tegaderm™ Absorbent

Das innovative Wirkprinzip

Das Wundexsudat wird durch den auf der Wunde liegenden perforierten Tegadermfilm in die Acryl-Polymerauflage im Inneren der Wundaufgabe absorbiert und über den äußeren Tegadermfilm als Wasserdampf teilweise wieder abgegeben – so bleibt ein idealefeuchtes Wundmilieu erhalten.

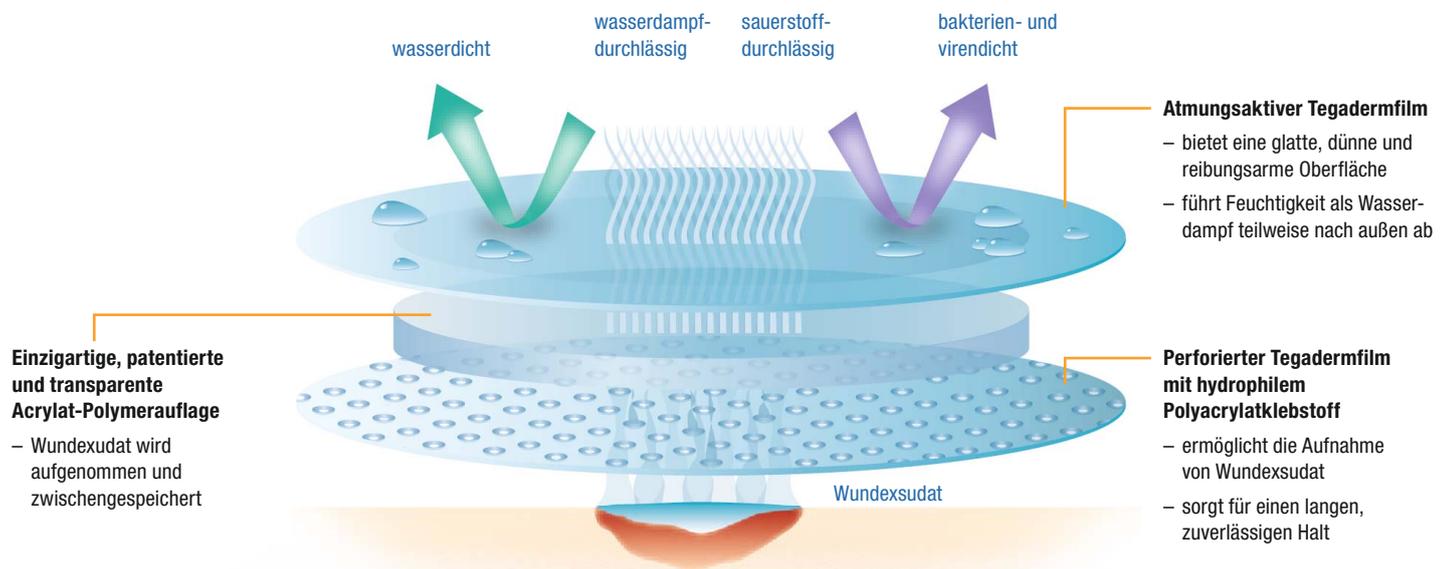

Absorption

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Transparenter Hydroaktivverband



Bestellinformationen

	Bestell-Nr.	Größe Acrylauflage	Größe insgesamt	Verbände/ Schachtel	PZN
	90800 Oval	3,8 x 5,7 cm	7,6 x 9,5 cm	5	6916792
	90801 Oval	6,0 x 7,5 cm	11,1 x 12,7 cm	5	6916800
	90802 Rechteckig	10,1 x 10,1 cm	14,9 x 15,2 cm	5	6916823
	90803 Oval	8,5 x 10,7 cm	14,2 x 15,8 cm	5	6916817
	90805 Rechteckig	14,9 x 15,2 cm	20,0 x 20,3 cm	5	6916846
	90807 Sakral	11,6 x 14,5 cm	16,8 x 19,0 cm	5	6916852

Quelle:

¹ Marie Brown-Etris, RN, CWOCN and Marian Punchello, LPN, Etris Associates, Inc., Philadelphia, PA, USA; Use of a Transparent Absorbent Acrylic Dressing on a Stage II Pressure Ulcer of the Sacrum

² Fallbeispiel zur Verfügung gestellt von Dr. Walter Wetzel-Roth, Buchloe, Deutschland

Vertrieb durch:



Fresenius Kabi Deutschland GmbH
 Elise-Kröner-Straße 1
 61352 Bad Homburg v.d.H.
 Tel.: 0 61 72 - 6 86-82 00
 kundenberatung@fresenius-kabi.de
 www.fresenius-kabi.de

Weitere Informationen zu diesen und den zahlreichen Produkten aus dem innovativen Wundversorgungsprogramm der 3M Medica finden Sie auch unter www.3Mmedica.de

Diese Broschüre bitte nach Gebrauch recyceln.

3M, Tegaderm und Cavilon sind eingetragene Warenzeichen der Firma 3M. © 3M 2010. Alle Rechte vorbehalten.

7308831 BB/Graphix 08/2010



3M Medica
 Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
 Hammfelddamm 11
 41460 Neuss