



Compresse de froid instantané

- aide immédiate en cas de contusions & d'entorses
- prêt à l'emploi en quelques secondes
- idéal pour la maison & les déplacements
- froid homogène

Remarque:

Pour usage externe uniquement. Usage unique — ne pas recongeler. Toujours poser une serviette entre la compresse et la peau.

Ne pas abîmer la poche extérieure. En cas de contact du contenu avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Ne pas utiliser sur des patients souffrant de troubles sensoriels. Conserver la compresse hors de portée des enfants. N'utiliser pour un enfant que sous la surveillance d'un adulte.

Exemples d'utilisation:

- la compresse est activée en quelques seconde par simple pression et pourra servir aux premiers secours.
- appuyer et casser la bulle à l'intérieur de la compresse - secouer vigoureusement - envelopper dans une serviette et poser sur la zone douloureuse
- la compresse de froid instantanée à usage unique aide à réduire le gonflement et soulage la douleur en cas de contusions, entorses, tuméfactions, hématomes, piqûres d'insectes et rages de dents



Compresse de froid instantané



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Compresse de froid instantané	150 x 130 mm		99228	6499228