

# Askina® Derm

## Semipermeabler Transparent-Wundverband



B. Braun WoundCare

**Neu**  
Produktumstellung  
im August 2010

B. Braun Melsungen AG | OPM  
Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen  
Tel (0 56 61) 71-62 63 | Fax (0 56 61) 71-35 50  
[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de) | [www.wundheilung.bbraun.de](http://www.wundheilung.bbraun.de)

W.03.06.10/1 Nr. 999 6713 Stand: 06/2010

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Askina® Derm

## Semipermeabler Transparent-Wundverband




### Produktumstellung auf das neue Askina® Derm ab August 2010

Dank innovativer Veränderungen wie dem neuen, einfacheren Anwendungssystem (siehe Anleitung rechts) sowie einer optimierten Wasserdampfdurchlässigkeitsrate ist das neue Askina® Derm noch besser.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die neuen Artikelnummern.

| Produkt      | Größe        | VE        | PZN     | REF    |
|--------------|--------------|-----------|---------|--------|
| Askina® Derm | 4,4 x 4,4 cm | 5 Stück   | 0156222 | F72028 |
|              | 4,4 x 4,4 cm | 100 Stück | 7430086 | F72030 |
|              | 6 x 7 cm     | 5 Stück   | 0156239 | F72031 |
|              | 6 x 7 cm     | 100 Stück | 7430092 | F72033 |
|              | 10 x 12 cm   | 5 Stück   | 0156245 | F72034 |
|              | 10 x 12 cm   | 50 Stück  | 7430100 | F72036 |
|              | 15 x 20 cm   | 10 Stück  | 7430123 | F72038 |

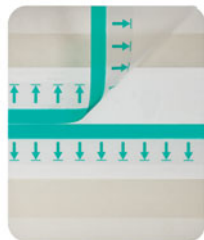

Askina® Derm kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Neues innovatives Anwendungssystem

Verbesserte MVTR\*

Verbesserte Klebeeigenschaften

Leichtes Entfernen

Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen

\* Moisture Vapour Transmission Rate = Wasserdampfdurchlässigkeitsrate

❶ Entfernen des Schutzpapiers mit Bedruckung von der klebenden Seite des Verbands.



❷ Positionieren des Verbands mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde. Sanft andrücken.



❸ Seitliche Schutzfolien langsam mit beiden Händen entfernen. Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken.



❹ Nach Befestigung des Verbands Trägerfolie mit den grünen Pfeilen in Pfeilrichtung abziehen.