

Gebrauchsanweisung

Allgemeine Hinweise

- Aus 97% Baumwolle und 3% Elasthan
- Frei von Latex und Medikamenten
- Luft- und wasserdurchlässig, sowie atmungsaktiv
- Hervorragende Haftung im Wasser
- Schränkt die Bewegung nicht ein

Nicht anzuwenden bei:

- Frischen Verletzungen der Haut oder offene Wunden
- Gerinnungsstörungen
- Gefäßpathologien (Thrombose)
- Akute, chronische Hauterkrankungen
- Allergien gegen einen der Inhaltstoffe im Tape oder Acrylkleber
(zunächst an einer kleinen Hautstelle testen)
- Maligne Tumore
- Schwangere dürfen das Tape nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt verwenden.
- Nicht für Patienten in Krebsbehandlung
- Bei Einnahmen von Medikamenten, die die Hautreaktion beeinträchtigen können
(Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.)
- Stark gebräunte Haut

Sollten durch das Anwenden des Tapes zur Hautirritationen kommen, entfernen Sie das Tape vorsichtig.

Vorsichtsmaßnahmen:

An den Körperstellen, die für den Patienten schwer zu erreichen sind, sollte das Tape von dem entsprechenden Fachpersonal geklebt werden.

Allgemeine Hinweise zu der Anlage von Tape:

- 1) Die Haut vor der Anwendung mit tape original Hautreinigung von Cremerückständen und anderen Verunreinigungen befreien.
- 2) Das Tape nur auf trockene und saubere Haut anlegen
- 3) Lokalisieren Sie den entsprechenden Muskelbereich
- 4) Messen Sie die entsprechende Länge des Tapes ab
- 5) Runden Sie die Ecken ab, um vorzeitiges Ablösen zu verhindern
- 6) Lösen Sie das Trägerpapier ca. 3-4cm vom Tape ab
- 7) Kleben Sie das Tape entsprechend Ihrer Beschwerden auf die Haut
 - Das Tape muss nach der Anlage warm gerieben werden, um den Kleber zu aktivieren
 - Das Tape sollte mindestens 30-60min vor sportlichen Aktivitäten angelegt werden
 - Das Tape zum Trocknen nur leicht abtupfen
- 8) Das Tape immer in Richtung des Haarwuchses und nicht ruckartig entfernen.

Lagerung

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 8°C und 25°C lagern.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Hersteller:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3
23611 Bad Schwartau
Germany

Kontakt:
0451/ 39890 530
E-Mail: info@unizell.de
www.unizell.de

Das Beste
für die Pflege.

unizell