

B. Braun Wipes

Nachfüllbarer Vliestuchspender

Charakteristik

Bei den B. Braun Wipes handelt es sich um einen nachfüllbaren Vliestuchspender mit saugfähigen und fusselfreien Vliestüchern zur Desinfektion von Flächen. Die B. Braun Wipes Vliestücher werden vom Anwender mit der Desinfektionsmittellösung getränkt. Die angesetzte Lösung ist 4 Wochen anwendbar. Das Spendersystem hat ein Fassungsvermögen von ca. 3 Litern, die Größe der Vliestücher beträgt 19 x 36 cm. Zur optischen Unterscheidbarkeit verschiedener eingefüllter Produkte stehen Etiketten in den Farben rot, blau und grün zur Verfügung.



Eigenschaften

- bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- gebrauchsfertige Lösung ist 4 Wochen anwendbar
- wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Etiketten mit Kugelschreiber beschriftbar
- saugfähiges und fusselfreies Vlies
- sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung

...sparsamer Verbrauch und wiederverschließbarer Deckel

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit dem B. Braun Wipes Spendersystem geprüft. B. Braun Wipes Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.


B. Braun Produkt	Mindestkonzentration	EZ
Hexaquart® forte	0,5 %	60 Min.
Hexaquart® plus	0,5 %	60 Min.
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5 %	60 Min.
Melsept® SF	1,0 %	60 Min.
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.

Hinweise


Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Deckel unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen.

Das eingefüllte Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel muss mit dem B. Braun Wipes Spendersystem sowie den B. Braun Wipes Vliesrollen kompatibel sein. Lassen Sie sich die Kompatibilität vom Hersteller der Desinfektions- und Reinigungsmittel bescheinigen.


Hinweise zur Anwendung

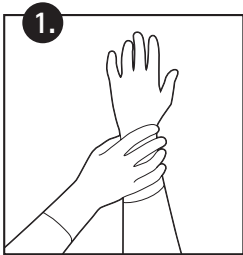

1. Handschuhe tragen

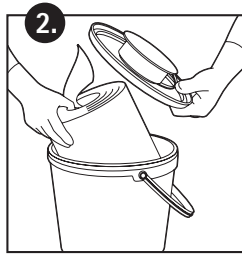

2. Vliestuchrolle einsetzen

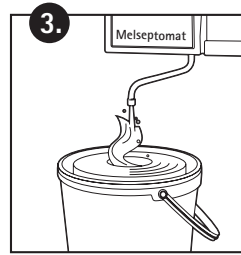

3. Ca. 3 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist



4. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch verwerfen



5. Aufkleber beschriften und aufkleben

Nachfüllen

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Spendersystem neu befüllt werden. Nur gereinigte, desinfizierte und vollständig trockene Vliestuchspender dürfen neu befüllt werden:

1. Handschuhe tragen
2. ggf. Vliestücher und Desinfektionsmittelreste entsorgen
3. Alle Oberflächen des B. Braun Wipes Spendersystems gründlich mit einem in Desinfektionsmittellösung getränkten Lappen reinigen und desinfizieren.
4. Alle Teile vollständig trocknen lassen. Einwirkzeit der Desinfektionsmittellösung beachten.
5. Danach eine neue Vliesrolle einsetzen und 3 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung einfüllen. Deckel schließen.
6. Neues Etikett beschriften und im dafür vorgesehenen Feld anbringen.

Material und Entsorgung

Das B. Braun Wipes Kunststoffspendersystem besteht aus lebensmittelbeständigen Polypropylen. Der Systemdeckel besteht aus dem gleichen hochwertigen Material. Er lässt sich mit einem hörbaren Knacken luftdicht verschließen.

Nur vollständig entleerte Spendersysteme entsorgen.

B. Braun Wipes Vliestücher bestehen aus saugfähigem, fusselfreiem Synthetickvlies (ca. 65 g/cm²). Nach der Anwendung werden sie verworfen.

Lieferform	REF	PZN
Spendersystem mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19162	6067637
Vliesrolle mit 100 Tüchern	19164	6067643