

PEDI SOFT®
GelLine

Zehen-/ Finger-
haube aus Gel
2 Stück
small

Art. Nr. 107 640

Strapazierfähiger
Schutz aus Gel



PEDI SOFT®
GelLine



STRAPAZIERFÄHIG UND LANGLEBIG

Vertrieb in der Schweiz:
Orthosan AG
CH-3042 Ortschaften
Tel. 0848-800 333

BORT GmbH · Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt

Art. Nr. 107 640 small



4WA-107642/D-05/11 wmm



LOT:

PZN 4738151

li ili IIIli IVi Ij IIj IIIj IVj

Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen. Speziell auch bei Hammerzehen.

Funktion:

Die PediSoft® GelLine Zehen-/Fingerhaube kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Bietet speziell auch bei Hammerzehen einen idealen Schutz vor Druckstellen.

Anwendung:

Die PediSoft® GelLine Zehen-/Fingerhaube über die betroffene Zehe oder den betroffenen Finger ziehen. Zur Vermeidung von Mazerationen sollte das Produkte für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abgenommen werden.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen und gut trocknen lassen. Gegebenenfalls leicht einpulvern.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen! Bei Auftreten von Hautirritationen oder Durchblutungsstörungen das Produkt sofort absetzen und ggf. einen Arzt konsultieren.



Vorteile:

- > Die Gelpolster verteilen den Druck optimal
- > Langlebig, sehr strapazierfähig und mehrfach verwendbar
- > Sehr weich und glatt
- > Sehr hygienisch
- > Dank **Memory-Effekt** optimale Anpassung, kehrt nach dem Tragen sofort in die Ursprungsform zurück

PEDISOFT® GELLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



Art. Nr. 107 620



Art. Nr. 107 660



Art. Nr. 107 680