



Zehen-/Finger-
schutz-Pad
small
2 Stück

Art. Nr. 137 010

Sanfter Schutz
für empfindliche
Füße



PEDI SOFT[®]
TEXLINE



IN BEWÄHRTER QUALITÄT
MIT TEXTILBEZUG

Vertrieb in der Schweiz:
Orthosan AG
CH-3042 Ortschwaben
Tel. 0848-800 333



BORT GmbH · Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt · www.bort.com

Art.Nr. 137 010 small



4AZ-137012/D-05/11 wm



LOT:

PZN 5563305

li Ili IIIli IVli Ij IIj IIIj IVj

PEDI SOFT®
 TEXLINE



Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen. Speziell auch bei Hammerzehen.

Funktion:

Das Zehen-/Fingerschutz-Pad kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Bietet speziell auch bei Hammerzehen einen idealen Schutz vor Druckstellen.

Anwendung:

Das Zehen-/Fingerschutz-Pad so über den Zeh oder den Finger ziehen, dass das Gel-Polster auf der abzupolsternden Stelle liegt. Zur Vermeidung von Mazerationen sollte das Produkt für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abgenommen werden.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen!

Beim Auftreten von Hautirritationen oder Durchblutungsstörungen das Produkt sofort absetzen und ggf. einen Arzt konsultieren.



Vorteile:

- > dauerhaft, strapazierfähig, mehrfach verwendbar
- > sehr hygienisch und hautfreundlich
- > angenehmes Tragegefühl
- > Maschinenwaschbar bei 30°C
- > Polster verteilt den Druck optimal und schützt vor zusätzlichem Druck von außen
- > Kehrt nach dem Tragen dank **Memory-Effekt** sofort in die Ursprungsform zurück

UNSERE PEDISOFT® TEXLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



Art. Nr. 137 030



Art. Nr. 137 040



Art. Nr. 137 050



Art. Nr. 137 060



Art. Nr. 137 080



Art. Nr. 137 100