

Sitty® Air Sitzkissen

Mit dem Sitty® Air Sitzkissen erlebt man ein dynamisches Sitzgefühl. Durch die ständige Bewegung wird die Muskulatur gestärkt und die Durchblutung gefördert. Zusätzlich wird die Wirbelsäule mobilisiert. Die beiliegende Handpumpe ermöglicht die Einstellung eines individuellen Härtegrades des Kissens wobei weniger Luftdruck einen höheren Wirkungsgrad bedeutet.

Indikationen

- Verbesserung der Sitzhaltung
- Entlastung der Bandscheiben
- Förderung des Gleichgewichts
- Training der Rückenmuskulatur

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

Das Sitty® Air Sitzkissen wird gebrauchsfertig geliefert, der Luftdruck/Härtegrad kann jedoch mit Hilfe der beiliegenden Pumpe individuell angepasst werden.

- Aufpumpen (Härtegrad erhöhen): Das angefeuchtete Nadelventil vorsichtig einführen und solange aufpumpen, bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist.
- Luft ablassen (Härtegrad verringern): Das angefeuchtete Nadelventil vorsichtig ohne Pumpe einführen. Jetzt auf das Sitzkissen drücken und die Luft solange entweichen lassen bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist.


Material

- PVC

Pflege- und Waschinweise

- Für die schonende Reinigung verwenden Sie einen milden, lösemittelfreien Kunststoff-Reiniger oder eine milde Seifenlauge


Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

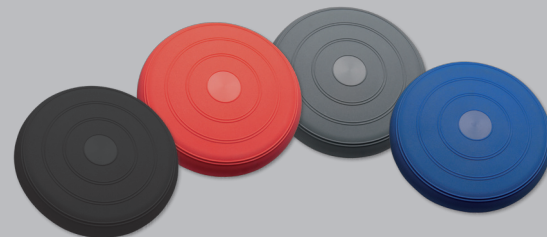

Art./REF	Durchmesser	Farben
21001	Ø 33 cm	Schwarz, Rot, Anthrazit, Blau
21002	Ø 36 cm	

Zubehör

Wir empfehlen zu dem Sitty® Air Sitzkissen einen feuchtigkeitsableitenden **Klima-Spezialbezug**. Erhältlich im Sanitätsfachhandel.

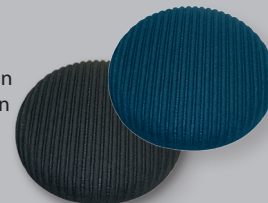

Art./REF	Durchmesser	Farben
21007	Ø 33 cm	Marine, Schwarz
21008	Ø 36 cm	