

Exadrop®

Präzisions-Tropfenregler für
die Schwerkraftinfusion



Neu:
Leichter und exakter einstellbar –
konstantere Tropfraten durch
optimierte Technik

B | BRAUN

Größerer Einstellkomfort und mehr Sicherheit für die Schwerkraftinfusion

Leicht und exakt einstellbar mit einer Hand


■ Exadrop® liegt sicher in der Hand und läßt sich mit einem einfachen „Dreh“ leicht und exakt einstellen.

Einfach und schnell zur gewünschten Infusionsrate


■ Gezieltes Anwählen eines Skalenwertes statt zeit-aufwendiges Einstellen der entsprechenden Tropfrate mit einer Rollenklemme.

■ Einfaches Optimieren der Durchflußrate durch stufenlose, präzise Feinabstimmbarkeit.

■ Exakte Reproduzierbarkeit von Infusionsraten-Einstellungen bei Neustarts.

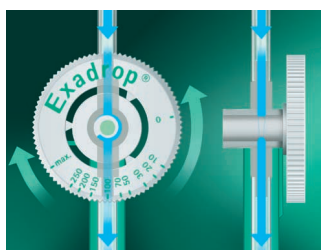

▲ **Exadrop® – Schlauchunabhängige Durchflußregulierung:**
Ein Präzisions-Dosierelement begrenzt analog zur jeweiligen Einstellung das Durchflußvolumen.

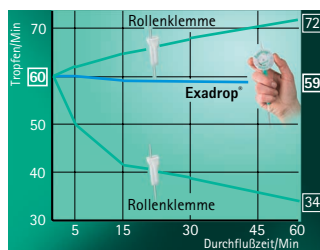

▲ **Exadrop® vs. Rollenklemme: Im Systemvergleich erreicht Exadrop® konstantere Infusionsraten:**
Bei der Rollenklemme weicht der elastische Infusionsschlauch bereits nach kurzer Zeit dem Anpreßdruck des Rollrades aus mit der Folge, daß sich Lumen und Durchflußrate ständig verändern.

Ohne Nachjustieren konstanter infundieren

■ Die Exadrop® Anwendung erspart das häufige Korrigieren der Einstellung, wie es bei einer Rollenklemme wiederholt erforderlich ist.

■ Die schlauchunabhängige Regulierung des Durchflußvolumens sorgt für vergleichsweise konstantere Infusionsraten.


Zuverlässiger das Infusionsziel erreichen

■ Exadrop® bietet gegenüber der Rollenklemme ein deutliches Plus an Komfort und Sicherheit für die Infusionsroutine.

■ Typische Gefahren der Schwerkraftinfusion wie Unter-/Überdosierung sowie Free-Flow können verringert werden.

⚠ Die Skalenwerte dienen zur Orientierung und beziehen sich auf die Infusion von 0,9 % NaCl-Lösung über eine Vasofix® Braunüle G18 und auf eine Höhendifferenz zwischen Lösungsbehälter und Patient von 76 cm. Andere Bedingungen haben entsprechend Abweichungen zur Folge. Die Einstellungen müssen daher unbedingt durch vergleichende Kontrollen der Tropfrate überprüft werden!

Bestelldaten: (Verkaufseinheit 50 Stück)

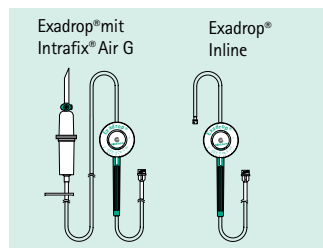

Mit Infusions- gerät	Ohne Infusions- gerät	Mit Belüftung - Euroklappe	Elast. Injektions- zwischenstück	Injektionsport	PVC-frei	Produktname	Schlauchlänge ca. cm	Art. Nr./REF
●	●	●	●			Exadrop® mit Intrafix® Air G	150	406 1209
●	●	●	●			Exadrop® mit Intrafix® Air G	180	406 1284
●	●	●	●			Exadrop® mit Intrafix® Air G	210	406 1225
●	●	●	●	●		Exadrop® mit Intrafix® Air G	150	406 1276
●	●	●	●	●	●	Exadrop® mit Intrafix® Air Neutrapur® G	150	406 2264
	●					Exadrop® Inline	54	406 1306

Vertrieb für Österreich:
B. Braun Austria Ges.m.b.H.
In den Langäckern 3-5
A-2344 Maria-Enzersdorf a. Geb. (NÖ)
Telefon (0 22 36) 4 65 41-0 Δ Serie

Vertrieb für die Schweiz:
B. Braun Medical AG
Postfach 21
CH-6203 Sempach-Station
Telefon (0 41) 4 62 62 44

B | BRAUN
MEDICAL

B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D-34209 Melsungen

Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71-20 44