

## **Bischoff & Bischoff**

Bedienungsanleitung

### **Rezi Gebo**



### **Garantie-Abschnitt**

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: Rezi / Gebo

Seriennummer:\*  
(vom Fachhandel einzutragen)

**Fachhändler:**

Datum und Stempel

#### **Bischoff & Bischoff GmbH**


Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248/ 9209-2 • Fax: +49 7248/ 9209-3

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

*Enjoy mobility.*

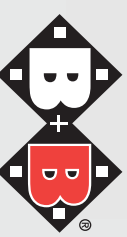



## Rezi (Reziprokes Gehgestell) Gebo (Starres Gehgestell, faltbar)

**Sehr geehrter Kunde,**  
die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehhilfe besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

### 1. Entfalten

Seitenteile mit Griffen nach aussen schwenken, bis sie hörbar einrasten.

### 2. Falten

Teleskopverriegelung drücken und gleichzeitig erst das rechte, dann das linke Seitenteil nach innen schwenken.

### 3. Rahmenhöhe einstellen

Federstift drücken und das Standrohr in der orthopädisch korrekten Position einrasten lassen.

### 4. Achtung - Sicherheitshinweise - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485

- Max. Belastbarkeit 120 kg!
- Beim Faltvorgang auf Quetschgefahr achten!
- Hinweise nach der Höheneinstellung:
  - auf korrekten Sitz der Federstifte achten!
  - alle 4 Standfüße auf die gleiche Höhe einstellen!
  - nur auf festem, ebenen Untergrund einsetzen!

### 5. Technische Daten

	Rezi	Gebo
Gewicht	2,5 kg	2,2 kg
Rahmenhöhe	82-92 cm	82-92 cm
Querstreben	2	2
Höhenverstellung	5-fach	5-fach
Farbe	Bronze	Bronze
Maße (gefaltet)		
Breite	53 cm	58 cm
Tiefe	10 cm	10 cm
Höhe	variabel	variabel

