

Gebrauchsinformation

Werolin® Wundreinigungsspray

Alkoholfreie Lösung zur schmerzfreien Reinigung, Befeuchtung und Heilung von akuten Wunden.

Eigenschaften:

- Für die Reinigung akuter Wunden, z.B. Riss- und Schnittwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Effektive Dekontamination akuter Wunden
- Optimierung des Milieus (pH-Wert)
- Schmerzfremie Wundreinigung
- Löst Verkrustungen ab
- Wundheilungsfördernd
- Verhindert Infektionen
- Abschwellend
- Zum wiederholten und langfristigen Gebrauch
- Kompatibel mit anderen Produkten der Wundversorgung

Indikationen:

- Reinigung und Befeuchtung akuter Wunden

Anwendung:

Werolin Wundreinigungsspray® unmittelbar nach der Verletzung auf die Wunde sprühen. Bei Bedarf mehrmals täglich wiederholen. Für beste Ergebnisse Pflaster oder Verband anlegen und diesen mit Werolin Wundreinigungsspray® feucht halten. Für eine bessere kühlende Wirkung kann Werolin Wundreinigungsspray® vor Anwendung im Kühlschranks aufbewahrt werden. Für Kinder geeignet.

Anwendungseinschränkung:

Schwangerschaft und Stillzeit: Es finden sich keine Anhaltspunkte auf mutagene oder embryotoxische Wirkung der Inhaltsstoffe. Aufgrund fehlender Studien und Langzeiterfahrung bei Schwangeren und Stillenden sollte Werolin Wundreinigungsspray® in diesen Fällen jedoch nur bei zwingender Indikation angewendet werden.

Kinder bis 2 Jahre: Aufgrund ungenügender Langzeiterfahrung sollte Werolin Wundreinigungsspray® in diesen Fällen nur bei zwingender Indikation nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen: Nicht anwenden in Kombination mit anionischen Tensiden.

Kontraindikation:

Keine Anwendung bei bekannten Allergien auf einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

Nicht bekannt.

Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität:

Nicht toxisch, nicht reizend, nicht irritierend, nicht sensibilisierend, keine Hemmung der Granulation und Epithelisierung, dermatologisch als unbedenklich bewertet.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung bei akuten Wunden. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de


Zertifiziert

 DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT


Haltbarkeit: 3 Jahre

Aufbrauchsfrist: 12 Monate nach Anbruch

Packungsgröße: 75 ml

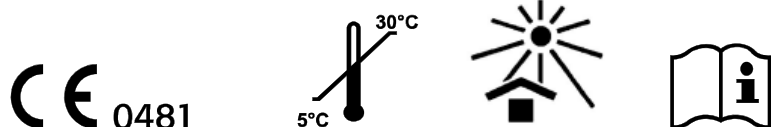

Chargenbezeichnung/  : siehe Aufdruck

Verfalldatum/  : siehe Aufdruck

Zusammensetzung:

Gereinigtes Wasser (DAB), Polihexanid, Spurenelemente (Zinkchlorid, Eisensulfatheptahydrat)

Ingredients (INCI) Total	INCI-KEY
Gereinigtes Wasser (DAB)	A
Polihexanid	G
Spurenelemente (Zinkchlorid, Eisensulfatheptahydrat)	G

INCI-KEY:

- A – Mehr als 50 %
- B – Mehr als 25%, aber weniger als oder gleich 50%
- C – Mehr als 10%, aber weniger als oder gleich 25%
- D – Mehr als 5%, aber weniger als oder gleich 10%
- E – Mehr als 1%, aber weniger als oder gleich 5%
- F – Mehr als 0,1%, aber weniger als oder gleich 1%
- G – Weniger als 0,1%



WERO GmbH & Co. KG
 Idsteiner Str. 94, 65232 Taunusstein
 Telefon 06128 9757-0
 Telefax 06128 9757-50
 E-Mail: info@wero.de
www.wero.de

Stand: 01/2018 V04;Fü

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
 IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
 BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
 IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
 BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
 Idsteiner Straße 94
 D-65232 Taunusstein
 Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

 **ecm** Certified Quality
 - 92 1001 -
 DIN EN ISO 9001
 DIN EN ISO 13485
 ÖKOPROFIT