


<p><b>Enste PhysioForm Reha</b>                  Klemens Enste                  Jakob-Ebersmann-Str. 7                  55411 Bingen                  Tel. 06721 42646, Fax 06721 44845 Mail  <a href="mailto:info@enste-reha.de">info@enste-reha.de</a> . <a href="http://www.enste-reha.de">www.enste-reha.de</a></p>	<p><b>Bedienungsanleitung für                  Innenraum-Fahrgestelle.                  Niedrige Ausführungen:                  Nr. UGF 500 , 501 , 502, 503,                  Hohe Ausführungen:                  Nr. UGH 500, 501, 502, 503</b></p> <p>Stand 9.2016</p>
---	---

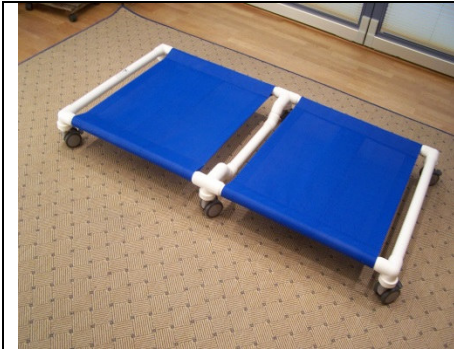

UGF Fahrgestell, flache Ausführung



UGH Fahrgestell hohe Ausführung



UGF 502 (150 cm lg.) m. MALTA 150 cm Durchmesser



UGH 503 (175 cm lg. mit KRETA-Standard (175 cm lg.))

Sehr geehrter Kunde,  
 wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen durch den Kauf eines Fahrgestelles .  
 Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch.  
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Bedienungsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

**Kontabilität unserer Produkte mit Fahrgestell der Typen UGE:**

Unsere Produkte zur Lagerung und Positionierung von behinderten Menschen bestehen in der Regel aus kissenartigen Artikeln, deren Aufbau und Anwendung im Katalog durch anschauliches Material in Text und Bild vorgestellt wird.  
 Für Produkte mit komplexerem Aufbau stehen Ihnen ausführliche Gebrauchsanleitungen zur Verfügung.  
 Alle unsere Produkte sind CE gekennzeichnet nach der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte der Klasse I.  
 Für Produktkombinationen zwischen den von uns hergestellten und unten genannten Lagerungs- und Positionierungsprodukten und den und den Innenraum- Fahrgestell-Typen besteht Kompatibilität gemäß der von uns ausgestellten Kompatibilitätserklärung.

**Vorstellung Fahrgestelle UGF 500 – 503 sowie UGH 500 – 503:**

Die Fahrgestelle UGE sind in vier verschiedenen Größen in flacher oder hoher Ausführung lieferbar. Sie bieten Unterstützung beim Transport von behinderten oder kranken Personen und dürfen nicht alleine, sondern ausschließlich unter Einbeziehung der von uns dafür vorgesehenen Lagerungshilfen eingesetzt werden.

**Handhabung und Auslieferung:**

**Montageanleitung für Fahrgestelle für Lagerungskissen:**

Zur Reduzierung der Transport- und Verpackungskosten wird jedes Fahrgestell teilmontiert angeliefert.  
 Vor Inbetriebnahme führen Sie daher bitte die Endmontage durch. Dazu müssen die Rohrenden des Fußteils – 33 mm tief bis zum Anschlag – in die Mitteltraverse gesteckt werden. Anschließend müssen die Rohrenden mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben – 2 Stück pro Rohr – an den vorgebohrten Stellen gesichert werden.

Vor Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Rohre ordnungsgemäß bis zum Anschlag eingeschoben wurden und alle Schrauben eingedreht sind.  
Das Fahrgestell ist dann nach Auflegen der ausschließlich von uns dafür vorgesehenen Lagerungshilfe einsatzfähig.  
Jedes Fahrgestell ist mit vier Feststellrollen ausgestattet

Die Typen UGF 500 und UGH 500 werden aufgrund ihrer kompakten Abmessungen komplett montiert geliefert.  
Fahrgestelle ab der Nr. 501 sind in der Mitte mit zwei weiteren Fahrrollen ausgestattet.

**Sicherheitshinweise:**

**Das Produkt darf nicht ohne Aufsicht benutzt werden.**

Die korrekte Benutzung eines Fahrgestelles in Kombination mit der dafür vorgesehen Lagerungshilfe erfordert eine genaue und sorgfältige Einarbeitung des Betreuers.

Das Produkt ist ausschließlich zum Transport und zur Lagerung- bzw. Positionierung in Innenräumen geeignet.

Es ist bei Anwendung unbedingt darauf zu achten, dass die Feststellbremsen angezogen werden sobald das Fahrgestell mit dem Benutzer zum Stehen gekommen ist (Besondere Vorsicht ist bei Innenräumen mit Schrägen Ebenen geboten!)

**Hohe Fahrgestelle sind nicht geeignet für Personen mit unkontrollierbaren Bewegungsmustern !**

Für das maximale Gewicht des Patienten beachten Sie bitte die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung.

**Reinigung:**

Sämtliche Teile der Fahrgestelle sind korrosionsbeständig.

Sie können mit einer milden Seifenlauge abgewaschen werden.

**Wartung:**

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere oder verlorene Teile und/oder Funktionsstörungen. Entfernen Sie das Produkt aus dem laufenden Betrieb wenn eine Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

**Abmessungen, Eigengewichte und maximale Belastung**

(N= Niedrige Ausführung 17,5 cm; Hohe Ausführung 40 cm)

Maße in cm	UGF 500 / UGH 500		UGF 501 / UGH 501		UGF 502 / UGH 502		UGF 503 / UGH 503	
Länge	90		120		150		175	
Breite	59		75		75		78	
Bodenfreiheit	12,5		12,5		12,5		12,5	
Gewicht kg	5,0	7,5	6,0	11,0	7,0	12,5	8,0	13,50
Max Belastg. kg	60		120		150		150	

**Die Fahrgestelle sind mit unseren folgenden Lagerungshilfen einsetzbar:**

UGF = flaches, UGH = hohes FG	UGF 500	UGH 500	UGF 501	UGH 501	UGF 502	UGH 502	UGF 503	UGH 503
PhysioForm	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 1 – 3	Gr. 1-3	Gr. 1– 4	Gr. 1 – 4	Gr. 3 + 4	Gr.3 + 4
MALTA Standard u.150er Ø	hochkant flach	nein	hochkant flach	nein	hochkant flach	nein	hochkant flach	nein
KRETA Standard = 175x80 cm Kreta Groß = 200x100 cm	Nein	Nein	Nein	Nein	Standard	Standard	Standard Groß	Standard Groß
Funktionskeilkissen	Gr. 1 + 2	Gr. 1 + 2	Gr. 1 – 3	Gr. 1-3	Gr. 1 – 4	Gr. 1 - 4	nein	nein
Lagerungsnest	Nein	Nein	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 1 – 3	Gr. 1 – 3	Gr. 2 + 3	Gr.2 + 3
Wellenkissen	Gr. 1 + 2	Gr. 1 + 2	Gr. 1 – 3	Gr.1– 3	Gr. 1 – 3	nein	ja	ja
Ruhematte	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	ja
ELBA	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	nein

**Veränderungen und unsachgemäßer Gebrauch unserer Fahrgestelle:**

Bitte nehmen Sie keine Veränderungen unseren Fahrgestellen vor.

Verwenden Sie die Fahrgestelle nur in Verbindung mit unseren oben angegebenen Lagerungshilfen und nur in den von uns freigegebenen Kombinationen.

Wir übernehmen keine Garantie bei eigenmächtigen Veränderungen und nicht freigegebenen Kombinationsmöglichkeiten.

Wir übernehmen keine Garantie bei Anwendungen in Kombination mit Fremdprodukten.

**Garantie:**

1. Produkt-Mängel sind spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware.

2. Transportschäden/Schadensmeldungen sind uns und dem Spediteur (vom Fahrer schriftlich bestätigt) sofort zu melden.

3. Für sachgemäße Ausführung übernehmen wir eine Gewähr für alle innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile, die sodann nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt oder ausgebessert werden.

3. Durch Änderungen- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornimmt, wird die Gewährleistung aufgehoben.

4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung.

5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.

6. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.

