

Unsere Komplettlösung für die Notfall-Intubation

 **INTERSURGICAL**
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
i-gel[®] O₂

Resus Pack

Konzentriert auf das Wesentliche

 **INTERSURGICAL**
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
Qualität, Innovation und Vielfalt



www.i-gel.com

INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

i-gel^{O₂}

Resus Pack



Besonders in der Notfallmedizin ist Equipment erforderlich, das sich leicht, schnell und verlässlich anwenden lässt. Das i-gel O₂ Resus Pack enthält alles, um die i-gel O₂ schnell und effizient vorzubereiten, einzuführen und zu sichern: eine i-gel O₂ supraglottische Atemhilfe, ein Tütchen Gleitmittel, ein Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter.

Die i-gel O₂ besitzt einen supplementären Sauerstoff-Port und einen integrierten Hakenring, an dem sich das Airway-Fixierband befestigen lässt.

Die i-gel O₂ wurde entworfen, um die Beatmung im Rahmen der Standard-Reanimation zu erleichtern, wie in den Richtlinien des European Resuscitation Council (ERC) und der American Heart Association (AHA) beschrieben. Da die i-gel O₂ einen supplementären Sauerstoff-Port besitzt, kann sie auch im Rahmen der passiven Sauerstoffzufuhr und des passiven Airway Managements (PAM™) eingesetzt werden, unter Berücksichtigung entsprechender Standards der kardiozerebralen Reanimation (CCR).



Das i-gel O₂ Resus Pack ist in 3 Größen für Erwachsene erhältlich und umfasst:

- i-gel O₂ supraglottische Atemhilfe
- Tütchen mit Gleitmittel – zur schnellen und einfachen Lubrikation der i-gel O₂ vor der Einführung
- Airway-Fixierband – um die i-gel O₂ zu sichern
- 12CH Absaugkatheter – zur Einführung durch den gastrischen Kanal, um Flüssigkeiten aus dem Magen zu entfernen.

Die neue i-gel O₂



Hakenring

Zusammen mit dem Airway-Fixierband hält er die i-gel in der richtigen Position

Gastrischer Absaugkanal

Erhöhte Patientensicherheit durch Kontrolle des Rückflusses

Nicht-aufblasbare Manschette

Ermöglicht ein reibungsloses Einführen und vermeidet Kompressionstraumata



Supplementärer Sauerstoff-Port

Zur passiven Sauerstoffzufuhr im Rahmen der kardiozerebralen Reanimation (CCR)

Integrierter Beißkeil

Vermindert das Risiko einer Atemwegsokklusion

Vestibulum Oris Stabilisator

Erleichtert die Einführung und vermindert die Gefahr einer möglichen Produkt-Rotation.

Epiglottisblocker

Trägt dazu bei, ein Herunterklappen der Epiglottis oder eine Obstruktion der distalen Atemwegsöffnung zu vermeiden

i-gel: Airway-Innovation seit 2007

i-gel ist eine supraglottische Atemhilfe zweiter Generation, die 2007 von Intersurgical eingeführt wurde. Als erste große Innovation seit der Larynxmaske hat die i-gel dem Airway Management neue Impulse gegeben und wird heute weltweit in Anästhesie und Notfallmedizin eingesetzt.



Die nicht-aufblasbare Manschette

Die Bezeichnung i-gel leitet sich von dem gelartig weichen Material des Produkts ab. Erst dieses innovative thermoplastische Elastomer ermöglichte die Entwicklung einer nicht-aufblasbaren Manschette. Da die i-gel O₂ perfekt auf die Anatomie der laryngealen Strukturen abgestimmt ist, ermöglicht sie eine optimale Abdichtung ohne Inflation der Manschette.

Einführung

Die Anwendung der i-gel O₂ ist unglaublich einfach, instinktiv sicher und dauert in der Regel weniger als 5 Sekunden. Das Einführen von Fingern oder Daumen in den Mund des Patienten ist dabei überflüssig.

Fixierung

Das i-gel O₂ Resus Set enthält ein speziell entworfenes Airway-Fixierband, mit dem die i-gel O₂ gesichert wird. Die Fixierung ist einfach: Das Fixierband wird unter den Nacken des Patienten gelegt und am Hakenring der i-gel O₂ befestigt. Die i-gel O₂ eignet sich besonders, wenn eine Fixierung mit Klebeband schlecht möglich ist, zum Beispiel bei Patienten mit Gesichtsbehaarung.


INTERSURGICAL
 COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS
i-gel[®] O₂
Resus Pack

Bestellinformation

Das i-gel O₂ Resus Pack enthält neben der i-gel O₂ einen herausnehmbaren Einsatz, in dem sich ein Tütchen Gleitmittel, ein Airway-Fixierband und ein Absaugkatheter befinden. Die speziell entworfene Verpackung ist transparent, steril, fest und garantiert so optimalen Schutz während Transport und Lagerung. Die i-gel O₂ hat einen farbcodierten Hakenring, der eine schnelle Bestimmung der Größe erleichtert. Das i-gel O₂ Resus Pack ist in drei Größen für Erwachsene erhältlich:



Nummer	Produkt	VE
 8705000	i-gel O ₂ Resus Pack – enthält die i-gel O ₂ Größe 5, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 90+kg	6
 8704000	i-gel O ₂ Resus Pack – enthält die i-gel O ₂ Größe 4, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 50-90kg	6
 8703000	i-gel O ₂ Resus Pack – enthält die i-gel O ₂ Größe 3, ein Tütchen Gleitmittel, Airway-Fixierband und einen Absaugkatheter CH 12. Für Erwachsene 30-60kg	6



Interaktiv



Mehr Informationen unter www.i-gel.com



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
 T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

