

Gebrauchsanleitung für Atemschutzmaske uvex silv-Air 9517 FFP2 NR

Lagerung und Transport

Die PSA ist stets in einem Umkarton zu transportieren, um die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) vor äußeren Einflüssen zu schützen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Piktogramme zur Lagerung und Haltbarkeitsdatum im unteren Bereich der Verpackungskartons. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch stets, ob das Produkt noch zur Verwendung geeignet ist. Das Produkt sollte sauber und trocken im Temperaturbereich von -20 °C bis +25 °C bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent gelagert werden. Das Produkt ist in der Originalverpackung ab Werk zu transportieren und aufzubewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung / Reinigung

Filterierende Halbmasken in den Schutzstufen FFP1, FFP2 oder FFP3 zum Schutz gegen feste und flüssige Aerosole bis zum Vielfachen des für das Aerosol definierten Grenzwertes. Schutzstufe FFP1 = 4-facher Grenzwert (geringe Toxizität); Schutzstufe FFP2 (mittlere Toxizität), = 10-facher Grenzwert; Schutzstufe FFP3 (hohe Toxizität) = 30-facher Grenzwert. Ist eine "D" Markierung auf der Maske hinter der Schutzstufe angebracht, ist dies ein Hinweis für das Bestehen der Dolomitsaubprüfung. Die Verpackungskennzeichnung "NR" (nur für eine Schicht zu verwenden "non reusable") oder "R" (wieder verwendbar "reusable") gemäß der geänderten Norm: EN149:2001+A1:2009.

Die Filtermaske uvex silv-Air 9517 ist eine PSA der Schutzstufe FFP2 die ebenfalls in vielen Bereichen einsetzbar ist, in denen Personen gesundheitsschädlichen Stäuben, Aerosolen oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 ausgesetzt sind. (Allgemeiner Grenzwert = 10-fach) Die Maske ist ein Einmalartikel und darf nicht gereinigt und nicht desinfiziert oder nach der Nutzung erneut verwendet werden (NR = non reusable). Eine erneute Nutzung ist auch durch jegliche Wartungsmaßnahmen ausgeschlossen. Die Maske ist nach der Nutzung unverzüglich zu entsorgen. Die Maske ist nur von eingewiesenen Personen zu verwenden. (Siehe auch Einschränkung für den Gebrauch)

Materialien

Folgende Materialien werden für die Herstellung dieses Produktes verwendet:

- **Ohrenbänder** – Thermoplastisches Polyamid (TPA) / Elastan (Latex-frei)
- **Filtermedium** – Meltblown-Vlies aus Polypropylen (PP)
- **Nasenbügel** – Stahl/Polypropylen (PP)
- **Produktgewicht:** uvex silv-Air 9517 = 5,3g

Die Produkte enthalten keinerlei Komponenten aus Naturkautschuk.

EU Verordnung

Die filterierende Halbmaske uvex silv-Air 9517 erfüllt die Anforderungen der EN149:2001+A1:2009 und trägt die CE-Kennzeichnung in Bezug auf die PSA Verordnung 2016/425. Die DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart ist verantwortlich für die EU-Baumusterprüfung (Modul B), sowie die laufende Produktüberwachung (Modul C2). Die Produkte sind in einer zertifizierten Produktionsstätte gefertigt. Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist ausgestellt worden für: uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Maske darf nicht benutzt werden, wenn

- die Sauerstoffkonzentration geringer als 19,5% ist.
- unbekannte Schadstoffe und/oder unbekanntes Schadstoffkonzentrationen vorliegen bzw. unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit besteht.
- die Aerosol-Konzentration die Werte der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen oder einen der Schutzfaktoren (FFP) x Grenzwert übersteigt.
- Gase und Dämpfe vorhanden sind.
- Verwenden Sie die Maske NICHT in explosionsgefährdeten Atmosphären.
- Die Maske nicht ohne vorherige Einweisung und Studium der Gebrauchsinformationen verwenden.

Norm

Das Produkt entspricht der Verordnung (EU) PSA 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung und nachfolgenden Änderungen. Ein vollständiges Exemplar der Normen kann über die Europäische Union (Official Journal of the European Union) unter der Bezugsnummer der harmonisierten Normen in der jeweils gültigen Fassung eingesehen werden. (Fundort: <http://eur-lex.europa.eu/hompage.html>)


uvex

uvex silv-Air 9517 FFP2 NR

Anleitung und Information des Herstellers für die PSA nach Verordnung (EU) 2016/425



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth
GERMANY
T: +49 911 9736-0
F: +49 911 9736-1760
E: safety@uvex.de
I: uvex-safety.com

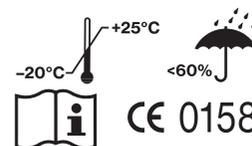

protecting people

Kontrollen vor dem Gebrauch

Der Verwender muss sich stets, vor Betreten des kontaminierten Bereichs vergewissern, dass die Maske für die Anwendung geeignet ist.

Packungsinhalt

- Maske uvex silv-Air 9517
- Anleitung und Information des Herstellers

Erläuterung zur Typbezeichnung Maskenaufdruck (Aufschlüsselung)

- Hersteller: uvex Arbeitsschutz GmbH
- Typbezeichnung: uvex silv-Air 9517
- Prüfnorm: EN 149:2001+A1:2009
- Artikelnummer: 8739517, 8739518, 8739519
- Ausführung: FFP2 NR (NR: nur für maximal eine Schicht geeignet)
- CE Kennzeichnung

Aufsetzanleitung

Vor dem Anlegen der Maske gründlich die Hände waschen.

-  1) Nasenbügel vorformen, auf dem Nasenrücken anpassen und platzieren.
-  2) Ziehen Sie die Bänder gleichmäßig über Ihre Ohren und passen Sie die Maske am Gesicht an.
-  3) Passen Sie den Nasenbügel an Ihre Nasenform an.
-  4) Entfernen Sie die Maske, indem Sie die Bänder von hinten über die Ohren ziehen.

Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig aufgesetzt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einen Schutz benötigt.

Die EU-Konformitätserklärung ist auf der Website www.uvex-safety.com/ce einzusehen und abrufbar.

Überprüfung des Dichtsitzes

- Umschließen Sie die Maske vorne mit beiden Händen, ohne dass die Maske verrutscht. Atmen Sie tief aus.
- Wenn Sie einen Luftaustritt an der Nase feststellen, muss der Nasenbügel entsprechend stärker angedrückt und der Gesichtsform angepasst werden.
- Sollte die Maske nicht eng genug am Gesicht anliegen, kürzen Sie die Befähigung durch einen Knoten. Prüfen Sie den Dichtsitz immer erneut nach entsprechenden Anpassungen.

Den Gefahrenbereich NICHT betreten, wenn die Maske NICHT dicht genug sitzt.

Für weitere Informationen über Dichtsitzprüfungen wenden Sie sich bei Fragen an unseren Kundenservice.

Warnhinweise

Überzeugen Sie sich stets, dass die verwendete Maske folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:

- für die Anwendung geeignet sein.
- korrekt sitzen.
- während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden.
- bei Bedarf ausgetauscht werden.
- darf nur für eine Schicht getragen werden.

Eine sachgemäße Auswahl, Schulung, Nutzung sind immer Voraussetzung, damit das Produkt den Träger vor Schadstoffen aus der Luft schützen kann.

Befolgen Sie diese Gebrauchshinweise stets ordnungsgemäß. Wenn die PSA nicht die ganze Zeit während der Schadstoffbelastung getragen wird, so kann dies für den Träger gesundheitsschädliche Folgen, bis zur Invalidität, nach sich ziehen.

Richten Sie sich in Bezug auf Eignung und sachgemäße Nutzung der PSA immer auch an den geltenden örtlichen Vorschriften.

Der Träger muss immer vor der Nutzung zuerst entsprechend den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in der richtigen Anwendung des Produktes unterrichtet werden. Dies kann zum Beispiel durch den jeweiligen Sicherheitsbeauftragten erfolgen.

Durch die Ohrbänderung können Schmerzen im Ohrenbereich auftreten.

Diese Produkte schützen den Träger nicht vor Gasen und Dämpfen.

Setzen Sie das Produkt nicht in Umgebungen ein, die weniger als 19,5% Sauerstoff enthalten.

Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Schadstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt. Gesichtsbehaarung im Maskenbereich kann sich als hinderlich für den Sitz der Maske erweisen und die Abdichtung gefährden.


Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn:

- sich Atembeschwerden einstellen
- Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten.

Wenn die uvex silv-Air 9517 Beschädigungen aufweist oder der Träger einen hohen Atemwiderstand bemerkt, bitte Gefahrenbereich verlassen und die Maske auswechseln und entsorgen. Empfehlung: Wenn der Atemwiderstand steigt oder Unwohlsein stattfindet, muss die Maske gewechselt werden. Die Maske darf nicht geändert, repariert (gewartet) oder aufbereitet werden.

Entsorgung

Zur Entsorgung von gebrauchten uvex silv-Air 9517 Atemschutzmasken beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften.

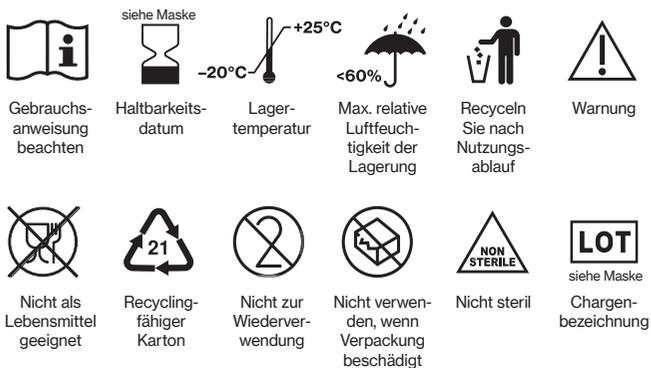

Hersteller
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth
GERMANY
T: +49 911 9736-0
F: +49 911 9736-1760
E: safety@uvex.de
I: uvex-safety.com



CE 0158