



Compresse chaud/froid

- compresse réutilisable remplie avec un gel
- s'adapte aux formes du corps
- soulage les tensions & réduit le gonflement
- application rapide
- soulage les douleurs
- apaisant
- avant l'utilisation en compresse froide, placer au congélateur pendant env. 2 heures
- avant l'utilisation en compresse chaude, placer dans de l'eau chaude pendant environ 4 minutes
- il est aussi possible de placer la compresse dans un récipient adapté au micro-ondes rempli d'eau, la compresse doit être entièrement couverte. Placer le tout au micro-ondes pendant environ 1 minute

Remarque:

Usage externe uniquement. Toujours poser une serviette entre la compresse et la peau. Ne pas utiliser pendant plus de 20 minutes.

Entre les applications, respecter un temps de pause de 30 minutes. En cas de maladies cardiaque, de problèmes de tension, de diabète, consultez votre médecin.

Ne pas utiliser les compresses endommagées. Si les douleurs persistent, veuillez consulter un médecin.

Exemples d'utilisation:

- comme compresse froide: pour réduire le gonflement et soulager les douleurs en cas de contusions, entorses ou hématomes,
- piqûres d'insectes et rages de dent
- comme compresse chaude: apaise et soulage le mal de dos, les tensions, les courbatures, les signes d'usure, rhumatismes non inflammatoires



Compresse chaud/froid



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Compresse chaud/froid	140 x 130 mm		99225	6499225
	200 x 120 mm		99226	6499226
	290 x 120 mm		99227	6499227