



DESIMATIC-ID PLUS

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten und Endoskopen

Einsatzbereich

Desinfektion von thermolabilem und -stabilem Instrumentarium, z. B. flexible und starre Endoskope, wasserdichte Ultraschallsonden, Anästhesiezubehör, Atemmasken, Instrumente etc. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Aufzubereitende Endoskope und Instrumentarium sofort nach Gebrauch in die DESIMATIC-ID PLUS-Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten, auch bei Hohlkörperinstrumenten. Nach der Desinfektion gründlich mit Wasser (Trinkwasserqualität) abspülen/ durchspülen. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller.


Technische Informationen

Karton mit 6 Flaschen à 2 Liter Art.-Nr. 00563

Wirkstoffe

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 93,9 g Reaktionsprodukt aus DMO-THF, Ethanol und Wasser

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS08

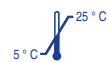

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid	2,0 % 60 Min. 4,0 % 30 Min. 5,0 % 15 Min.	7@ #%) \$) † EN #&' (#1 H3: Hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	2,0 % 60 Min. 4,0 % 30 Min. 5,0 % 15 Min.	7@ 14348† EN 14563† H3: Hohe Belastung
Mykobakterizid (M. avium)	3,0 % 60 Min. 5,0 % 30 Min. 7,0 % 15 Min.	EN 14348, EN 14563, VAH Hohe Belastung
Viruzid	6,0 % 60 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung
Sporizid (C. difficile)	6,0 % 8 Std.	prEN17126, Niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Roto-, Noro-, und Adenoviren)
- Viruzid (inkl. Erreger der Hand-Fuß-Mund-Krankheit)
- Sporizid (inkl. C. difficile)
- Frei von Formaldehyd
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit der unbenutzten Lösung: 7 Tage
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet

Hinweise

Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums Präparat nicht mehr anwenden. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0222

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE