



## Incidin® Plus

# DAS PLUS AN SICHERHEIT FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- ▲ Patentierter Wirkstoff Glucoprotamin®
- ▲ Breites Wirkspektrum und hervorragende Reinigungsleistung
- ▲ VAH- und RKI-gelistet




# Incidin® Plus

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL MIT GLUCOPROTAMIN®  
ALDEHYDFREI UND OHNE QAV



Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA, TB) und Hefen	Hohe Desinfektionssicherheit auf allen abwaschbaren Flächen, selbst in Risikobereichen
Auf Basis des patentierten Wirkstoffes Glucoprotamin®	Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit
Hohe Materialverträglichkeit	Für alle Arten von Oberflächen und Böden geeignet

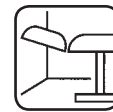

Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.  
D BIOZID N-11720

## WIRKSAMKEIT

## KONZENTRATION

## EINWIRKZEIT

VAH-Liste (bakterizid, levurozid)	%	ml/L	Min.
Flächendesinfektion gemäß VAH, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	2	20	15
	1	10	30
	0,5	5	60
	0,25	2,5	240
RKI-Liste	%	ml/L	Min.
Flächendesinfektion Wirkungsbereich A	8	80	360
IHO-Viruzidie-Liste	%	ml/L	Min.
Prüfung gemäß DVV mit / ohne Belastung			
Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,25 / 0,5	2,5 / 5	60 / 15
Rotavirus	0,5	5	15
Adenovirus	1	10	60
Papova-Viren / Polyomavirus SV40	0,5 / 1	5 / 10	60 / 30
EURO-Normen	%	ml/L	Min.
EN 1276 (bakterizid, mit Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (bakterizid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	5
EN 13697 (levurozid, mit / ohne Belastung)	0,25	2,5	15
EN 1650 (levurozid)	0,25	2,5	15
Zusätzliche Wirksamkeiten	%	ml/L	Min.
TBC**	0,25 / 0,5 / 1	2,5 / 5 / 10	60 / 30 / 15
MRSA	0,5	5	60
Influenza Viren (H1N1, A / H5N1)***	0,5	5	15
Tuberkoluzid + Mykobakterizid****	1,5 / 3	15 / 30	60 / 30

## ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen. Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

**Desinfektionsmittel sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 26 g Glucoprotamin®

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

\* gem. RKI-Empfehlung 1/2004 \*\* Suspensionstest mit Mycobakterium terrae (DGHM 1996) \*\*\* aufgrund begrenzter Viruzidie \*\*\*\* Flächentest gem. DGHM 2001

Produkte

+

Dosierung

+

Service

=

Sicherheit

UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

**Worldwide Headquarters**  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

**Regional Office**  
Ecolab Deutschland GmbH  
Reisholzer Werftstr. 38-42  
40589 Düsseldorf  
Phone +49 (0) 211 98 93-0  
Fax +49 (0) 211 98 93-174  
[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

**Regional Office**  
Ecolab Schweiz GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone +41 (0) 614 66 94-66  
Fax +41 (0) 614 66 94-55  
[www.ecolab-suisse.ch](http://www.ecolab-suisse.ch)

## BESTELLINFORMATIONEN

Incidin® Plus Dosierbeutel	30 125 20	400 x 20 ml
Incidin® Plus Nachfüllflasche	30 115 10	3 x 2 L
Incidin® Plus Kunststoffkanister	30 115 20	6 L
Incidin® Plus Kunststoffkanister	30 115 30	30 L
Incidin® Plus Kunststofffass	30 115 40	200 L

