

Truncuflex® Rippenbandage Damen

Die Truncuflex® Rippenbandage besteht aus einem elastischen Textilmaterial und sorgt für eine gleichmäßig flächendeckende Kompression. Die hautfreundlichen, atmungsaktiven und latexfreien Materialien versprechen einen hervorragenden Tragekomfort. Mittels Klettverschluss kann der Verband leicht an- bzw. abgelegt und individuell angepasst werden.

Indikationen

- Rippenbrüche/-prellungen
- Verletzungen des Brustraumes (Thorax)

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen und -reizungen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten, wie Unproportionalität, Fettleibigkeit etc. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Anlegehinweise

Achten Sie beim Anlegen der Bandage darauf, dass diese im lockeren Zustand korrekt sitzt. Den Druck und die Festigkeit können Sie mit dem Klettverschluss regulieren. Ist die Bandage geschlossen, sollte der Klettverschluss auf dem dafür vorgesehenen Flauschbereich sitzen.

Sollte die Bandage nach dem Anlegen nicht richtig sitzen, versuchen Sie nicht, diese durch Ziehen und Zerren zurechtzurücken, sondern legen Sie sie neu an.

Fassen Sie nicht mit den Fingernägeln in das Material. Durch unsachgemäße Handhabung können sich die Fäden verschieben, was aber keinen Einfluss auf die Wirkungsweise hat und daher auch kein Reklamationsgrund ist. Mit wenigen Handgriffen können Sie die Fäden wieder in die ursprüngliche Form schieben.

Materialien

- Baumwolle, Elastan, Perlon, Helanca, Polyester

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen!
- 

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

