

## Anleitung

**2623001**

# pedalo® Feder- Einschubelement

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de

Anleitung bitte lesen und aufbewahren



**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlissene Teile umgehend mit Original- Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

### Das Feder-Einschubelement passt für folgende Artikel:

- 13003050 pedalo®-Federbrett 50
- 13004050 pedalo®-Vestimed® 50 inkl. Thera-Set 2
- 13005150 pedalo®-Federbrett 150
- 13018000 pedalo®-Vestimed®-Set-Angebot
- 14004050 pedalo®-Vestimed® 50 inkl. Textil-Powerband
- 653295 pedalo®-5S-Station Federbrett Senso-Federsystem
- 14014000 Swaywaver-Behandlungsliege

Mit dem Feder-Einschubelement wird die Stabilität der Standplattform individuell erhöht und den Bedürfnissen des Übenden optimal angepasst. Ein oder mehrere Einschubelemente werden dabei zwischen den Plattformen schnell und werkzeuglos positioniert.

### Montage:

Das Einschub Federelement etwas zusammen drücken und seitlich zwischen oberer und unterer Plattform einschieben.

Dann das Federelement an den gewünschten Platz schieben.

Die Position und die Anzahl der Einschubelemente verändern den Federeffekt wesentlich.

### Achtung:

**Nach jeder Übungseinheit sollte die Lage der Einschubelemente überprüft werden.**

Zum Entfernen der Einschubelemente einfach Feder im unbelasteten Zustand seitlich herausziehen.

Niemals eine Feder im belasteten Zustand herausnehmen. Die Feder könnte ansonsten herausschnellen.

