


# Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

**Tobago**



*Enjoy mobility.*

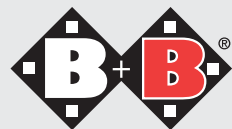

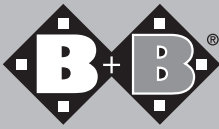

## **Duschstuhl „Tobago“ (faltbar, mit Rückenlehne)**

### **Sehr geehrter Kunde,**

Mit dem Erwerb dieser B+B Duschhilfe verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das die Pflege zu Hause vereinfachen wird.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Duschhilfe besser vertraut und sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Produkt!

### **1. Konformitätserklärung**

B+B erklärt als Hersteller des Produktes, dass der Duschstuhl „Tobago“ vollständig den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht.

### **2. Angaben zur Benutzung des Produktes**

Der Duschstuhl „Tobago“ ist ausschließlich für das Sitzen beim Duschen konzipiert.

### **3. Verwendungszweck - Indikationen**

Standunsicherheit/ Stehunsfähigkeit bei Gebrauchsminderung/ fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten, (z.B. bei Kraftverlust bei bösartigen Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen) kombiniert mit einer Rumpfhaltungsschwäche.

## **4. Achtung - Sicherheitshinweise - Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14971**

- Für das Einsteigen und Aussteigen ist eine Begleitperson erforderlich
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Alle 4 Hockerfüße auf die gleiche Höhe einstellen
- Auf korrekten Sitz der Arretierknöpfe achten
- Bei fester Anbringung der Sitzfläche auf dem Sitzrahmen achten: Einklemmgefahr.
- Sitzfläche lediglich zum Sitzen.



Abb. 1

## 5. Zusammenbau und Montage

Schwenken Sie beide Seitenrahmen nach vorne. Klappen Sie den Sitzrahmen von oben nach unten auf die Auflagefläche des Seitenrahmens.

Fixieren Sie Sitz- und Seitenrahmen indem Sie beide Arretierbolzen in die vorgesehene Bohrungen einsetzen (siehe Abb. 1).



Abb. 2

Für einen korrekten Sitz müssen sowohl die Griffbögen wie auch die Aussparung des Sitzes nach vorne ausgerichtet sein!

Der Sitz wird auf den Sitzrahmen durch kräftigen Druck eingerastet (siehe Abb. 2).

Alle 4 Fußteile in den Rahmenrohr einstecken und mittels Arretierstift auf die gewünschte Höhe einstellen (siehe Punkt 7)

Um den Sitz zu entnehmen, halten Sie diesen am Seitenrahmen fest und ziehen Sie den Sitz vom Rahmen ab.

## 6. Rückenlehnenmontage

Die Rückenlehne wird auf das entsprechende Seitenrahmenelement aufgesetzt (siehe Abb. 3) und mit Befestigungsknöpfe in den vorgesehenen Bohrungen in Rahmen und Rückenlehne befestigt (siehe Abb. 4).

## 7. Einstellen der Sitzhöhe

Die Sitzhöhe ist 5-fach höhenverstellbar (Einstellbereich 8 cm).

Ziehen Sie den Arretierungs-Clip an allen 4 Standfüßen heraus.

Ziehen Sie das Innenrohr auf die gewünschte Position. Dabei müssen die Bohrungen von Innen- und Außenrohr übereinstimmen.

Stecken Sie den Arretierungs-Clip wieder durch die Bohrung.

Achten Sie darauf, dass der Clip ohne Spalt am Rohr anliegt (siehe Abb. 5). Der Arretierungs-Clip ist korrekt positioniert, wenn sich das Innenrohr nicht verdrehen lässt.

Alle vier Standfüße müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden!

## 8. Reinigung und Desinfizierung des Duschstuhls

Der Duschstuhl Tobago ist für den Wiedereinsatz unter Berücksichtigung der Reinigung und Desinfizierung mit handelsüblichen Mitteln geeignet.



Abb. 3

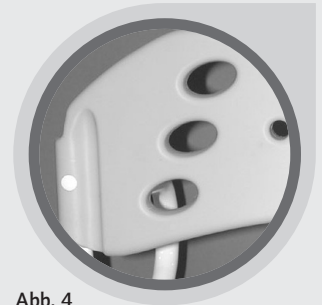


Abb. 4



Abb. 5

Arretierungs-Clip


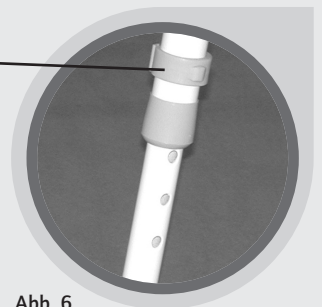


Abb. 6

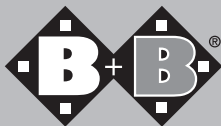

## **9. Technische Daten**

- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- B/T/H (in mm): 570 / 520 / 880-955
- Gewicht: 4,8 kg.
- Sitzhöhe: 460-540 mm 5-fach über Clip
- Sitzfläche Breite / Tiefe: 450/400 mm
- Hitzebeständigkeit: bis zu 125°C
- Farbe: Blau oder Weiß
- Rahmen: aus Aluminium
- Sitz und Rücken: aus Kunststoff (PE-HD)

## **10. Einstellung-Reparaturwerkzeug**

- 1x Maulschlüssel 10 mm
- 1x Sechskantwinkelschlüssel Nr. 6

## **11. Kennzeichnung des Produktes**

Auf den Rahmen des Produktes ist einen Kennzeichenaufkleber angebracht wo Sie die Produktbezeichnung/ Seriennummer/ max. Benutzergewicht/ Firmenadresse noch mal finden.

## **12. Garantie**

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

Eine Rücksendung des Produktes muss in der Originalverpackung erfolgen.

## **13. Lieferung der Serienausstattung**

- 1/1x Seitenrahmen links/rechts
- 1x Sitzrahmen
- 1x B+B Sitzfläche (Kunststoff)
- 1x B+B Rückenlehne (Kunststoff)
- 4x Teleskopröhre
- 4x Sicherungstifte
- 1x Schraubensatz
- 2x Blindniete (Kunststoff weiss)

## Garantie-Abschnitt

---

(Achten Sie auf unsere allgemeinen  
Geschäftsbedingungen)

**Typ: Tobago Duschstuhl**

**Seriennummer:\***

(vom Fachhandel einzutragen)

**Fachhändler:**

**Datum und Stempel**

\* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

## **Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

