

D Gebrauchsanweisung

AERObag® - PMB, Taschenmaske
 Artikel-Nr.: HBM06-PMB

GBA-BM06-PMB_1 | Stand 14.05.2013 | Revision 4

Zweckbestimmung

Die AERObag® Taschenmaske wurde primär für die Mund-zu-Maske Beatmung bei Atemstillstand bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern entwickelt. Die Anwendung sollte nur durch Personen, die eine entsprechende Ausbildung in der Anwendung von Beatmungshilfen absolviert haben, erfolgen. An die Taschenmaske können andere Beatmungsgeräte z.B. Beatmungsbeutel oder sauerstoff-betriebene Beatmungsgeräte direkt angeschlossen werden.

Funktion

Die Abbildung 3 zeigt die Funktionsprinzipien bei verschiedenen Anwendungen.

Anwendung an Kindern | Erwachsenen

1 Etui öffnen. 2 Filter auf richtigen Sitz überprüfen und Maskendom nach außen drücken. 3 Maske mit dem Kinnenteil zwischen Unterlippe und Kinn des Patienten aufsetzen und damit gleichzeitig die Unterlippe zurückschieben, um den Mund offen zu halten. Das mit „Nose“ markierte Ende der Maske über die Nase des Patienten legen. 4 Halten Sie den Kopf des Patienten nach hinten überstreckt, indem Sie sein Kinn in Ihre Richtung ziehen, dadurch werden die Atemwege geöffnet, dadurch werden die Atemwege geöffnet. Drücken Sie die Maske mit Daumen und Zeigefinger fest auf das Gesicht des Patienten. Halten Sie gleichzeitig mit den restlichen Fingern das Kinn hoch.

Zeichenerklärung

	Latex frei Latex free		Vor Hitze und Licht schützen Store away from heat and light
	Nicht zur Wiederverwendung Not for reuse		Bestellnummer Order number
	Gebrauchsanweisung beachten Consider instruction manual		Chargenbezeichnung Batch number
	Haltbar bis Durable to		Enthält Phthalat Contains Phthalate
	Hergestellt am Date of manufacture		Phthalatfrei Phthalat free

PVC-Komponenten können Phthalate enthalten (siehe Kennzeichnung). Besondere Vorsicht bei:

- Neugeborenen
- Kindern vor der Pubertät
- Stillenden Frauen
- Schwangeren Frauen

Patient durch das Mundstück/Ventil langsam beatmen und kontrollieren ob sich der Brustkorb hebt 5. Mund von der Maske nehmen. Rückatemluft des Patienten herauslassen. **Anmerkung:** Erbricht der Patient, Maske abnehmen und Atemwege freimachen. Maske durch Schütteln oder Auswischen reinigen. Ventil durchblasen, um Funktion sicherzustellen. Maske wieder aufsetzen und mit der Beatmung fortfahren.

Anwendung an Kleinkindern

Die Anwendung erfolgt hierbei wie in Abbildung 6 beschrieben mit der Ausnahme, dass die Maske umgedreht (schmales Ende der Maske unter dem Kinn des Kleinkindes) auf das Gesicht gesetzt wird.

Anwendung mit Sauerstoff 7

Maske mit Kopfalteband befestigen. Die Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung wird damit erleichtert und eine spontane, eigenständige Sauerstoffeinatmung ist möglich. Extra O₂: Anschluss Schlauch der O₂-Quelle an den O₂-Anschluss der Maske anschließen. O₂-Flow einstellen. Beatmen, wenn erforderlich.

Filterwechsel

Zum Wechseln des Filters muss die Maske zusammengefaltet sein. Mit der einen Hand die Maske halten, Filtergehäuse mit Daumen und zwei Fingern der anderen Hand umfassen. Den Filter herausnehmen. Neuen Filter aufsetzen und nach oben drücken bis er fest sitzt 9.

Aufbewahrung

Maske immer im Etui aufbewahren.

Technische Daten

Temperaturbereiche:

Anwendung: -18°C – 40°C

Lagerung: -30°C – 50°C

Expirations-/Inspirationswiderstand für den Patienten:

2,5 cm H₂O bei 50 l/min

Totraum: < 142ml

Maskenanschluss: AD 15 mm

Sauerstoffanschluss: AD 6,4 mm

Filtermedium: hydrophobes Filtervlies


Die Leistungsdaten sind Nennwerte

Ersatzteile

HBM06-PMB-F - Bakterienfilter


GBA-BM06-PMB_1 - Gebrauchsanweisung

AERObag® - PMB Taschenmaske | Anwendung

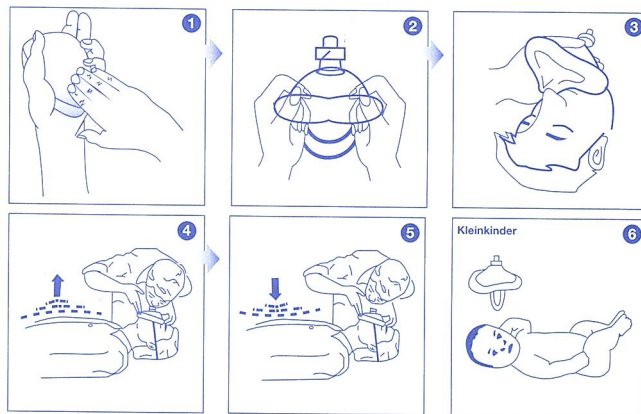

Anwendung mit Sauerstoff

Anwendungsfunktionen

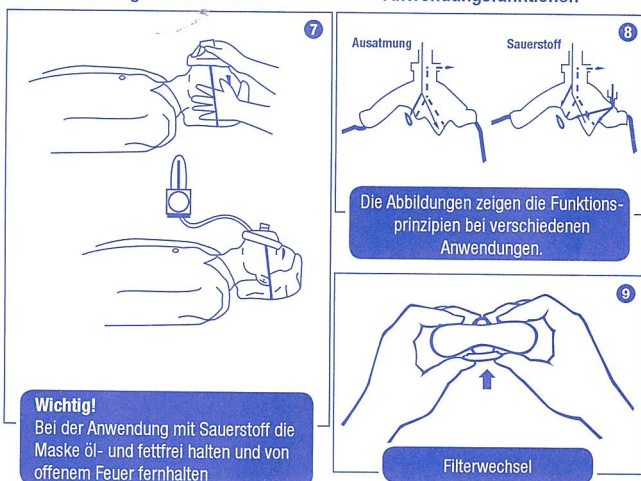

Wichtig!

Bei der Anwendung mit Sauerstoff die Maske öl- und fettfrei halten und von offenem Feuer fernhalten

Die Abbildungen zeigen die Funktionsprinzipien bei verschiedenen Anwendungen.

Filterwechsel

HUM
Systems
for Life®

Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | D-44536 Lünen
FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
Mail: sales@hum-online.de | http://www.hum-online.de