



Compresse chaud/froid pour enfants

- compresse réutilisable remplie avec un gel
- s'adapte aux formes du corps
- soulage les tensions & réduit le gonflement
- application rapide
- soulage les douleurs
- apaisant
- adapté pour réfrigérateur et micro-ondes
- remplir d'eau un récipient adapté au micro-ondes de façon à ce que la compresse soit entièrement recouverte
- réchauffer la compresse avec le récipient pendant environ 1 minute à 450 watts dans le four à micro-ondes
- assorti dans 4 motifs -> pas de choix de couleurs possible !

Remarque :

Usage externe uniquement. Ne pas utiliser par voie orale (mordre, sucer, etc.).

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser sous la surveillance d'adultes.

Toujours poser une serviette entre la compresse et la peau. Ne pas utiliser pendant plus de 20 minutes.

Entre les applications, respecter un temps de pause de 30 minutes. En cas de maladies cardiaque, cardiovasculaire ou de diabète, consultez votre médecin. Ne pas utiliser les compresses endommagées.

Exemples d'utilisation :

- comme compresse froide : pour réduire le gonflement et soulager les douleurs en cas de contusions, entorses, gonflements, hématomes, piqûres d'insectes et maux de dent
- comme compresse chaude : apaisante et réduit les maux de dos, les tensions et les courbatures
- pour réchauffer les poches



Compresse chaud/froid pour enfants, motif : koala

Compresse chaud/froid, motif : croco

Compresse chaud/froid, motif : hippo

Compresse chaud/froid, motif : tigre

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Compresse chaud/froid pour enfants	145 x 125 mm		99586	6499594