

# Truncuflex® Elastischer Stützbinder

Der Truncuflex® Elastische Stützbinder besteht aus elastischen Textilmaterial und sorgt für eine gleichmäßig flächendeckende Kompression. Die hautfreundlichen und atmungsaktiven Materialien versprechen einen hervorragenden Tragekomfort. Mittels Klettverschluss kann der Verband leicht an- bzw. abgelegt und individuell angepasst werden.

## Indikationen

- Postoperative Versorgung nach Operationen im Bauchraum
- Bandscheibenbeschwerden
- Hernien im Bauch-/Beckenbereich, z. B. Nabelhernien
- Leichte Lumbalbeschwerden
- Hängeleib
- Zur Stützung geschwächter Bauchmuskulatur (z.B. nach der Schwangerschaft)
- Wirbelsäulenveränderungen

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

## Anleghinweise

- Den Verband um den Körper legen und den Klettverschluss so spannen, dass er gerade auf dem Flausch liegt
- Zum Korrigieren der Kompression den Verband vollständig öffnen und dann mit gewünschter Spannung verschließen
- Falls der Stützbinder nicht korrekt sitzt, sollte es vermieden werden, diesen durch Ziehen und Zerren zurechtzurücken
- Nicht mit den Fingernägeln in das Material fassen. Durch unsachgemäße Handhabung können sich die Fäden verschieben, was aber keinen Einfluss auf die Wirkungsweise des Verbandes hat und daher auch kein Reklamationsgrund ist. Mit wenigen Handgriffen können die Fäden wieder in die ursprüngliche Form geschoben werden.

## Materialien

- Siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen
- Siehe Wäscheetikett

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**

