

Kalt-/Warm-Kompresse für Kinder

- wiederverwendbare Kompresse mit Gelfüllung
- passt sich den Körperkonturen flexibel an
- löst Verspannungen & mindert Schwellungen
- schnelle Anwendung
- schmerzlindernd
- wohltuend
- für Kühlfach und Mikrowelle geeignet
- mikrowelleneigenes Behältnis mit Wasser füllen, so dass die Kompresse voll bedeckt ist
- die Kompresse mit dem Behältnis ca. 1 Minute bei 450 Watt in der Mikrowelle erwärmen
- 4 Motive sortiert -> kein spezieller Motivwunsch möglich!

Hinweis:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht oral anwenden (beißen, lutschen etc.).

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendung länger als 20 Minuten.

Zwischen Anwendungen 30 Minuten pausieren. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden. Kompresse keinesfalls mehr verwenden, wenn sie beschädigt ist

Anwendungsbeispiele:

- als Kalt-Kompresse abschwellend und schmerzlindernd bei Prellungen, Verstauchungen, Schwellungen, Blutergüssen, Insektenstichen und Zahnschmerzen
- als Warm-Kompresse wohltuend und schmerzlindernd bei Rückenschmerzen, Verspannungen und Muskelkater
- als Taschenwärmer



Kalt-/Warm-Kompresse, Motiv: Hippo



Kalt-/Warm-Kompresse, Motiv: Koala



Kalt-/Warm-Kompresse, Motiv: Kroké



Kalt-/Warm-Kompresse, Motiv: Tiger

Produkt	Maße	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Kalt-/Warm-Kompresse für Kinder	145 x 125 mm		99586	6499594