

Technisches Merkblatt

Handschutzband Flexi-Tape 7695-50-45

Beschreibung / Eigenschaften

Elastische, selbsthaftende Schutzbandage, speziell entwickelt zur Verwendung an Fingern und Fingerkuppen. Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und besitzt eine überdurchschnittliche Scheuerbeständigkeit. Die Bandage abreißen und mit leichtem Zug um die zu schützende Stelle wickeln.

Maße: Länge 4,50 m, Breite 50 mm
selbsthaftende Schutzbandage
ideal für Hand- und Fingerletzungen
wasser- und werkstoffbeständig
dehn- und reißbar



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Nach ordnungsgemäßer Desinfektion den Medybee-Schutzverband abreißen und mit leichtem Zug um die verletzte Stelle drehen. Bei größeren Verletzungen sollte sterile Gaze verwendet werden. Für Fingerspitzenverletzungen, das Produkt einmal um den Finger wickeln, so dass ca. 2cm überstehen. Diese werden umge-klappt und der restliche Verband wird anschließend um den Finger gewickelt.

Bei größeren Verletzungen an z.B. Arm oder Bein kann das Produkt nach Ärztlicher Erstversorgung als zusätzlicher Schutz über das bereits vorhandene Verbandsmittel angewendet werden. Diese Anwendung ermöglicht es problemlos der Körperpflege (Waschen/Duschen) nachzukommen. Hierbei sollte das Produkt, überlappend und mit festem Zug, mindestens 3x um den bestehenden Verband gewickelt werden. (Dieser Schutzverband kann mehrmals verwendet werden).

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.