

Technische Informationen

Wirkstoffe

einbringen.

Karton mit 12 Softpacks à 80 Tücher

Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

(CLP): GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-91510

CHZN6745

Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen.

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol. Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008

DESIFOR-QUICK, wipes

Flächendesinfektionstücher • begrenzt viruzid

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Art.-Nr. 20610

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränkten Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten. Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m².

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 1 Min. konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung EN 1276, EN 1650, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	DVV/RKI-Leitlinie
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz 30 Sek	EN 14476 niedriae Belastuna

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaft
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchröße 20 x 20 cm, Tuchqualität 50 g/ m²
- Tücher biologisch abbaubar
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
- HACCP-konform

Hinweis

Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München Tel. +49 89 3506080 info@dr-schnell.de www.dr-schnell.com

