

Lysoformin® Plus-Schaum



**Schnellwirkender Desinfektions- und
Reinigungsschaum für medizinisches
Inventar**

CE 0482



Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Lysoformin® Plus-Schaum

Gebrauchsfertig

Zusammensetzung

100 g enthalten:

0,18 g Polyhexamethylene biguanide · HCl,

0,46 g Bis-(3-aminopropyl) dodecylamine,

0,10 g Didecyldimethylammoniumchloride, Duftstoffe

Anwendungsgebiete

Schnellwirkendes Desinfektionsmittel für medizinisches Inventar im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG). Auch für andere wasserbeständige Flächen geeignet.

Art der Anwendung/Dosierungsanleitung

Gebrauchsfertige Lösung. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände einschäumen und einwirken lassen. Dann mit einem sauberen, feuchten Tuch nachwischen oder **Lysoformin® Plus-Schaum** unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen.

Einwirkzeit: 5 Minuten.

begrenzt viruzid* inkl. HBV/HCV/HIV 5 Min.

Polyomavirus (SV 40) 15 Min.

*gem. RKI-Empfehlung BG-Blatt 01/2004

Warn- und Lagerhinweise

- Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder bei 5 – 30 °C aufbewahren!
- Beim Umgang mit dem Präparat geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-259

Eigenschaften

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc), Pilze und behüllte Viren
- optimale Benetzung der Flächen und damit schonende und sichere Desinfektion
- einfache Handhabung, sofort einsetzbar
- frischer Geruch

Besondere Hinweise

a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch

Sollte das Präparat **Lysoformin® Plus-Schaum** durch unsachgemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muß sofort ein Arzt aufgesucht werden. Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei **oralen** Einnahme **reichlich** Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen **reichlich** mit Wasser spülen.

b) Sonstiges

Gegenstände/Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind nach abgeschlossener Desinfektion mit Trinkwasser nachzuspülen!

c) Desinfektionsmittel sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Gebrauchsinformation lesen.

Versandereinheit/Packung

Art.-Nr.

12 x 1-Liter-Flasche mit Schaumkopf
2 x 5 Liter-Kanister

2505
2509

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an. Wir rufen sofort zurück.



030 - 77 99 2-0



Lysoform

Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin

Telefax 030 - 77 99 2-259

www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

Info.-Telefon 0700LYSOFORM