

# medimex Ultraschallgel 5 Liter Cubitainer (mit Auslaufhahn)

## Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt

**REF** 8M50170155

**Zusammensetzung:** (Inhaltsstoffe INCI)  
Aqua, Carbomer, Sodium hydroxide, Propylene glycol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben  
(Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.)

**Produktgröße:** 5 Liter im Cubitainer mit Schraubverschluss  
(mit beiliegendem Auslaufhahn)

**Beschreibung:**

- Farblos, geruchlos
- Hautschonend, pH-neutral
- Höchste Übertragungswerte und beste Kunststoffverträglichkeit
- Auf Wasserbasis unter Vakuum hergestellt (deionisiertes Wasser pH7)
- Formaldehydfrei, fettfrei, microblasenfrei

**Hinweise:**

- Unsteril
- Zur äußerlichen Anwendung
- Enthält Alkohol



### Medizinprodukt Risikoklasse I

**Anwendungsbereiche:** Gel für Ultraschall-Anwendungen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin

**Haltbarkeit:** Durch die konstruktivbedingt fehlende Wiederverschließbarkeit von Dosierspendern in Verbindung mit 5 l und 10 l Kunststoffkanistern ist eine Haltbarkeit nach Anbruch bis zu 6 Monaten, längstens jedoch bis zum Erreichen des auf dem Produkt aufgedruckten Verfallsdatums, gewährleistet. Gleiches gilt für alle anderen Gebinde.  
Nach Verwendung sind die Gebinde grundsätzlich sorgfältig zu verschließen.

**Anwendungshinweise**  
**Umfüllen:** Das Umfüllen von Ultraschallgel aus 5 l bzw. 10 l Gebinden in Kleingebinde bis 1000 ml darf nur unter Beachtung nachfolgend aufgeführter hygienischer Anforderungen durchgeführt werden:  
Der Anwender trägt nach Handdesinfektion Einmalhandschuhe und verwendet vom Hersteller mitgelieferte Kleingebinde. Die Umfüllung muss chargenrein erfolgen, damit auch die eindeutige Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Nach Entleerung des Großgebundes sind die ebenfalls entleerten Kleingebinde zu entsorgen.  
Vor der Anwendung ist der ordnungsgemäße Zustand des Ultraschallgels festzustellen.

**Verpackungseinheiten:** VE= 1 Cubitainer im Karton



**Vertrieb**  
**medimex GmbH**  
In den Fritzenstücker 9-11  
D-65549 Limburg  
fon +49.6431.7302 300  
fax +49.6431.7302 235  
www.medimex.de



GELLO® GmbH Geltechnik  
Harmate 28  
D-48683 Ahaus

8M50170155-TD000921-4  
Stand: 05-2022