

PEDI SOFT®
 TEXTLINE

Hammerzeh-
 Korrektur-Pad
 small
 Schuhgröße bis 39
1 Stück
 Art. Nr. 137 120

*Sanfter Schutz
 für empfindliche
 Füße*



PEDI SOFT®
 TEXTLINE



IN BEWÄHRTER QUALITÄT
 MIT TEXTILBEZUG

Vertrieb in der Schweiz:
 Orthosan AG
 CH-3042 Ortschaften
 Tel. 0848-800 333

BORT GmbH · Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt · www.bort.com

Art.Nr. 137 120 small



Made in Germany

4AK-137122/D-05/11 wmm



LOT:

PZN 0527813

li lli llili lvi lvj llvj llilj lvj

Zur Korrektur der Fehlstellung bei Vorliegen von einer oder mehrerer Hammerzehen

Funktion:

Die betroffenen Zehen werden durch das festgezogene Flauschband leicht korrigiert. Es sind bis zu 3 Zehen gleichzeitig korrigierbar. Der Vorfuß wird weich abgepolstert und somit vor zusätzlichem Druck geschützt. Das Flauschband sorgt für eine korrekte und dauerhafte Positionierung des Pads.

Anwendung:

Betroffene Zehen auf der komplett mit Textil überzogenen Seite mit dem Flauschband fixieren, auf der Unterseite festziehen und am Klett befestigen. Überstehendes Flauschband kann gekürzt werden.

Für einen optimalen Halt über dem Hammerzeh-Korrektur-Pad möglichst Socken oder Strümpfe tragen.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen! Produkt enthält Latex und kann ggf. allergische Reaktionen auslösen.



Vorteile:

- > Dauerhaft, strapazierfähig, mehrfach verwendbar
- > Sehr hygienisch und hautfreundlich
- > Angenehmes Tragegefühl
- > Polster verteilen den Druck optimal und schützen vor zusätzlichem Druck
- > Kehrt nach dem Tragen dank **Memory-Effekt** sofort in die Ursprungsform zurück

UNSERE PEDISOFT® TEXLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



Art. Nr. 137 010



Art. Nr. 137 030



Art. Nr. 137 040



Art. Nr. 137 050



Art. Nr. 137 060



Art. Nr. 137 100