

Bischoff & Bischoff

Bedienungsanleitung

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen)

Typ: B+B Toilettenrollstuhl TS-1

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248/9209-2 • Fax: +49 7248/9209-3


www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de

TS-1



Enjoy mobility.

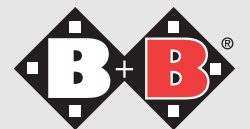

TS-1 (Toilettenrollstuhl)

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieses Toilettenstuhles der Marke B+B verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihres B+B Toilettenrollstuhls besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

1. Achtung - Sicherheitshinweise! (Risikoanalyse nach DIN EN ISO 13485)

- Max. Benutzergewicht 120kg!
- Benutzung des Toilettenstuhles nur im Innenbereich und mit Hilfe einer Begleitperson!
- Schieben nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!
- Im Stand stets beide Bremsräder arretieren!
- Weites, seitliches Herauslehnen vermeiden. Kippgefahr!
- Auf festen Sitz der Rückenlehenschrauben achten!
- Der Toilettenstuhl ist vor unbefugter Benutzung (besonders durch Kinder) zu sichern!

Der Einsatz eines Toilettenrollstuhls wird erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen einer Toilette aufgrund der Behinderung nicht möglich ist.



- Abnehmbare Rückenlehne
- Rückenbespannung
- Schwenkbare Armlehne mit
Armpolster
- Arretierstift für Armlehne
- Sitzkissen
- Befestigungsschraube für
Rückenlehne
- Arretierhebel für Beinstützen
- Toilettentopf mit Deckel
- Beinstützen
- Hintere Lenkrolle, gebremst
- Vordere Lenkrolle, ungebremst

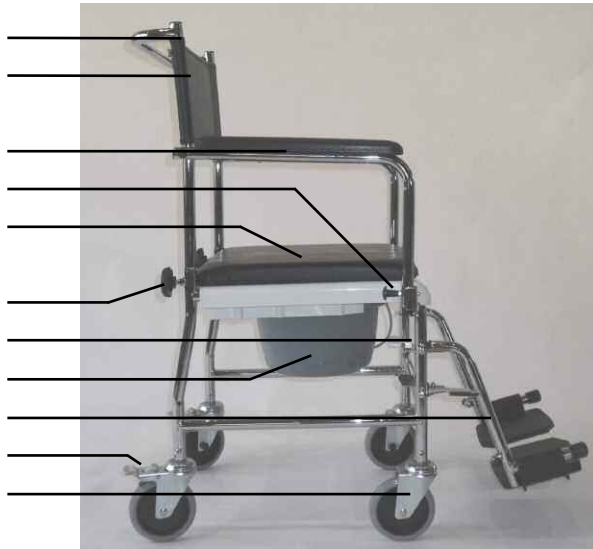


Fig. 1

2. Feststellbremse

Die zwei hinteren, bremsbaren Lenkrollen des Toilettens-
tuhles verhindern ein ungewolltes Wegrollen.

- Feststellen: Bremshebel mit dem Fuß bis zum Anschlag nach unten drücken (Abb.2)
- Lösen: Bremshebel mit der Fußspitze nach oben ziehen (Abb.2).

3. Beinstützen

Ihrem B+B Toilettensstuhl so einfach wie möglich zu machen, können Sie die Beinstützen im Bedarfsfall einfach nach außen abschwelen, ohne sie dabei abbauen zu müssen.

- Ziehen Sie den Arretierstift leicht nach außen und öffnen Sie dadurch die Verriegelung.
- Schwenken Sie die Beinstützen nach außen.
- Gegebenenfalls die Fußplatten vorher hochklappen.

Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, einfach die Beinstützen nach vorne klappen und arretieren.

Um die Beinstützen abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie den Arretierhebel nach innen (Abb.3) und öffnen Sie dadurch die Verriegelung.
- Schwenken Sie die Beinstütze nach außen.
- Ziehen Sie die Beinstütze nach oben heraus.



Wichtiger Hinweis

Beim Aufstehen aus dem Toilettensstuhl darf in keinem Fall auf die Fußplatten getreten werden!
Unfallgefahr!

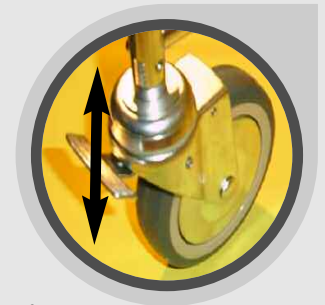


Fig. 2

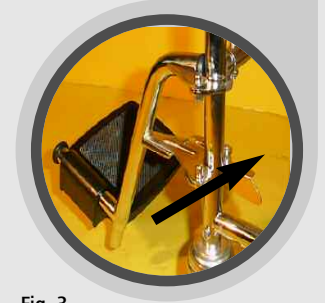


Fig. 3



Fig. 4

4. Toilettensitz

Toilettensitz abnehmen:

- Vordere Sitzkante nach oben aus der Auflage ziehen.
- Toilettensitz nach oben abheben.

Toilettensitz auflegen:

- Hintere Sitzkante mit den offenen Ecken zum Rücken schieben.
- Vordere abgerundete Sitzkante bis zum Anschlag nach unten drücken. Sitz muß einrasten.
- Auf festen Sitz überprüfen.



Fig. 5

5. Armlehnen

Die Armlehnen sind nach unten abschwengbar.

- Zum Abschwenken ziehen Sie den Knopf der Arretierung heraus und schwenken Sie die Armlehne nach unten ab.
- Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, schwenken Sie die Armlehne nach oben in die Ausgangsposition bis der Arretierbolzen hörbar einrastet.



Wichtiger Hinweis

Achten Sie darauf, daß sich beim Abschwenken der Armlehnen keine Personen hinter Ihrem Toilettenrollstuhl befinden!

8. Technische Daten

Sitzbreite:	45 cm
Sitztiefe:	44 cm
Länge:	96 cm
Höhe:	97 cm
Breite:	56 cm
Sitz bis Armlehnen:	22 cm
Sitz bis Rückenlehne:	34 cm
Max. Benutzergewicht:	120 kg
Gewicht:	15,3 kg