

HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen

mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung

autoklavierbar - ohne Werkzeug zerlegbar

Sterilisation der Reinigungspistole: Dampfsterilisation 134°C – Klasse B

Zum Ausspülen bzw. Ausblasen von verschmutzten Medizinprodukten bis 0,5Mpa (= 5bar).

Die Installation der Reinigungspistolen ist durch einen Fachbetrieb auszuführen.

STERILISIERBAR
RDG-TAUGLICH
VALIDIERT AUFBEREITBAR

Hinweis: Die verschiedenen Reinigungspistolen-Sets beinhalten immer die gleiche Reinigungspistole. Lediglich die Schläuche und die Set-Zusammenstellungen sind je nach Anwendungsbereich unterschiedlich.



Für VE-Wasser & für Trinkwasser kalt bis 5 bar, mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, VE-Wasserschlauch: Silikonschlauch mit Edelstahl-Schlauchumflechtung (KTW A, W 270, W 543) und Edelstahlanschlüssen, Schlauchanschluss 3/8" Überwurfmutter, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Kupplungsschutzkappe, Silikonöl, Ersatz-Kolbenfeder.

64-20810-00 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 100cm

64-20810-01 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 150cm

64-20810-02 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 200cm



Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, PVC-Gewebe-Druckluftschlauch (KTW), Schlauchausgang 1/2" Außengewinde mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 12mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder.

- 64-20820-00 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 100cm
- 64-20820-01 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 150cm
- 64-20820-02 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 200cm
- 64-20820-03 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 250cm
- 64-20820-04 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 300cm
- 64-20820-05 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 350cm
- 64-20820-06 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 400cm
- 64-20820-07 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 450cm
- 64-20820-08 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 500cm
- 64-20820-09 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 550cm
- 64-20820-11 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 600cm
- 64-20820-12 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 650cm



Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", blau, Arbeitslänge 250cm, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde (Messing vernickelt mit Knickschutz) mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 8mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder. (für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)

- 64-20820-50 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (blau)



Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", grün, Arbeitslänge 250cm, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde (Messing vernickelt mit Knickschutz) mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 8mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder. (für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)

64-20820-52 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (**grün**)

Einzelteile & Zubehör



64-20820-10 1 St. Reinigungspistole-Druckluft, mit Griff DN7,2 zur Adaption m. Edelstahl-Schnellkupplung (Nur Pistole, ohne Düsen!)

64-20810-10 1 St. Reinigungspistole-VE-Wasser / Trinkwasser, mit Griff DN7,2 zur Adaption m. Edelstahl-Schnellkupplung (Nur Pistole, ohne Düsen!)

Hinweis: Die Reinigungspistole 64-20820-10 und 64-20810-10 sind identische Produkte. Lediglich für Ausschreibungszwecke sind hier zweierlei Nummern angegeben. Druckluftpistolen können auch für VE-Wasser / Trinkwasser verwendet werden und umgekehrt.

Ersatz O-Ringe für die Reinigungspistole

- 64-20850-22** 1 VE O-Ring für Pistolenkörper u. Inline-Handgriff (5 Stück)
- 64-20850-24** 1 VE Kolben O-Ring klein (10 Stück) mit Aufziehhilfe
- 64-20850-25** 1 VE Kolben/ Düsen O-Ring groß (5 Stück)



64-20850-16 1 St. RP-Ersatz O-Ring Dichtungs-Set für die Reinigungspistole
Set: 5 St. O-Ring für Pistolenkörper u. Inline-Handgriff, 10 St. Kolben O-Ring (klein) mit Aufziehhilfe, 5 St. Kolben und Düsen O-Ring (groß) mit Aufziehhilfe, 1 St. Kolbenfeder



64-20850-23 1 St. RP-Kolben aus Kunststoff mit O-Ringen für (K) Pistolen



64-20850-26 1 VE RP-Kolbenfeder (1VE = 3 Stück)



64-20850-27 1 St. RP-Verschlusskappe für Pistolenkörper



64-20850-28 1 St. RP-Düsenansatzkappe für Pistolenkörper




64-20850-29 1 St. RP-Handgriff DN 7,2 mit O-Ring



64-20850-17 1 St. RP- Spitzdüse, M8 (bereits im Set enthalten)



64-20850-18 1 St. RP- Luer-Lock-Ansatz, M8 (bereits im Set enthalten)

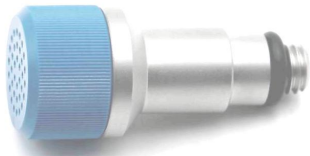

64-20850-14 1 St. RP- Brausedüse, M8, mit Kunststoffsieb blau (bereits im Set enthalten)



64-20850-15 1 St. RP- Ersatz-Brausedüsensieb, blau, für Brausedüse M8



64-20850-11 1 St. RP- Luer-Ansatz-Edelstahl, M8, (bereits im Set enthalten)



64-20850-19 1 St. RP-Schlauchdüse Größe 6



64-20850-33 1 St. RP-Silikonöl SLC 2000 Fujinon für die Reinigungspistole (bereits im Set enthalten)



64-20850-10 1 St. RP-Tischdurchführung für Plattenstärken bis 45mm (Standard)



64-20850-09 1 St. RP-Tischdurchführung für Plattenstärken bis 60mm (Sonderausführung)



64-20850-20 1 St. RP-Wandhalter für Edelstahl-Reinigungspistole mit 2 Schrauben und Dübel
(nicht einsetzbar bei Verwendung von I3-Filterssystemen)



64-20850-47 1 St. RP-Düsenständer (ohne Düsen) – Tischmodell (autoclavierbar 134°C)
 64-20850-57 1 St. RP-Düsenständer (ohne Düsen) – Wandmodell (autoclavierbar 134°C)



64-20850-34 1 St. Edelstahl-Schnellverschlusskupplung DN7,2
 für Reinigungspistole IG1/2" mit Dichtungsscheibe (bereits im Set enthalten)
 64-20850-35 1 St. Dichtungsscheibe H 3mm f. Schnellverschlusskupplung



64-20850-36 1 St. Kupplungsschutzkappe f. Edelstahl-Schnellverschlusskupplung (bereits im Set enthalten)



64-20850-12 1 St. RP-Schlauchanschlussadapter, Edelstahl, GA 3/8", GI 1/2"
64-20850-13 1 St. RP-Schlauchanschlussadapter, Edelstahl, GA 3/8", GI 3/4"



- 64-20825-20** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 100cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-21** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 150cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-22** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 200cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-25** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 300cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-26** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 400cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)

Hinweis: Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar



64-20825-50 1 St. Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", **blau**, Arbeitslänge 250cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD8mm)
(1/2"-Anschluss Messing vernickelt mit Knickschutz)
(für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)

64-20825-52 1 St. Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", **grün**, Arbeitslänge 250cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD8mm)
(1/2"-Anschluss Messing vernickelt mit Knickschutz)
(für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)



- 64-20815-20** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 100cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-21** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 150cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-22** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 200cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-24** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 300cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-26** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 400cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss

Filtersysteme



- 64-20850-65** 1 St. I3-FOUR Sterilfilter zur Anwendung für Reinigungspistolen-Sets „VE-Wasser/Trinkwasser“ zum Spülen von Medizinprodukten (z.B. Endoskope)
Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
Filtrationsleistung bis zu 10.000 l
Durchflussraten > 5l/min bei 1 bar, > 15l/min bei 5 bar



- 64-20850-66** 1 St. I3-Schnellverschlusskupplung – VE-Wasser G 1/2" Aussengewinde Edelstahl zur Verwendung mit I3-FOUR Sterilfilter 64-20850-65 (Gegenstück -> Schnellverschlusskupplung 64-20850-34)




- 64-20850-67** 1 St. I3-Schnellverschlusskupplung – VE-Wasser G 1/2" Innengewinde Edelstahl zur Verwendung mit I3-FOUR Sterilfilter 64-20850-65 (Gegenstück -> VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch 64-20815-xx)


Hinweis: Bei der Verwendung von Filtersystemen ist eine Benutzung des Wandhalters 64-20850-20 nicht möglich

Selecta-Reinigungspistolen (nicht für VE-Wasser geeignet)

NICHT AUFBEREITBAR

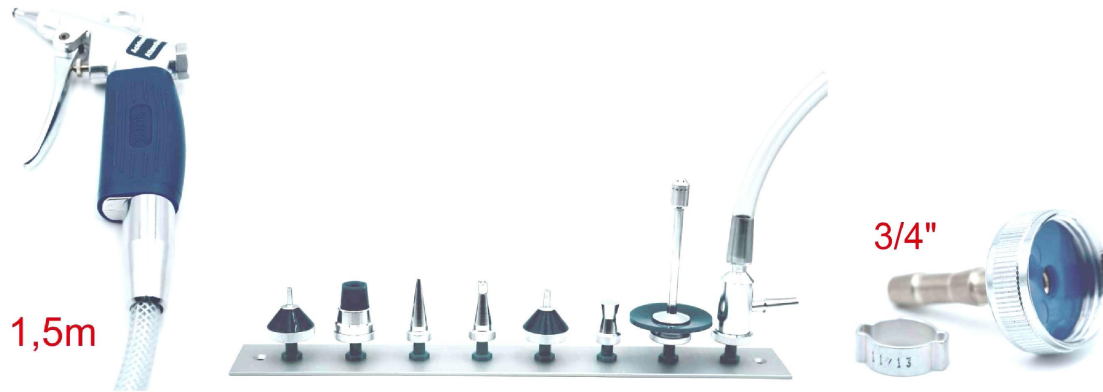

64-20900-00 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell komplett mit 1,5 m langem Schlauch, Konus und Aufsätzen A-H Standard 3/4"

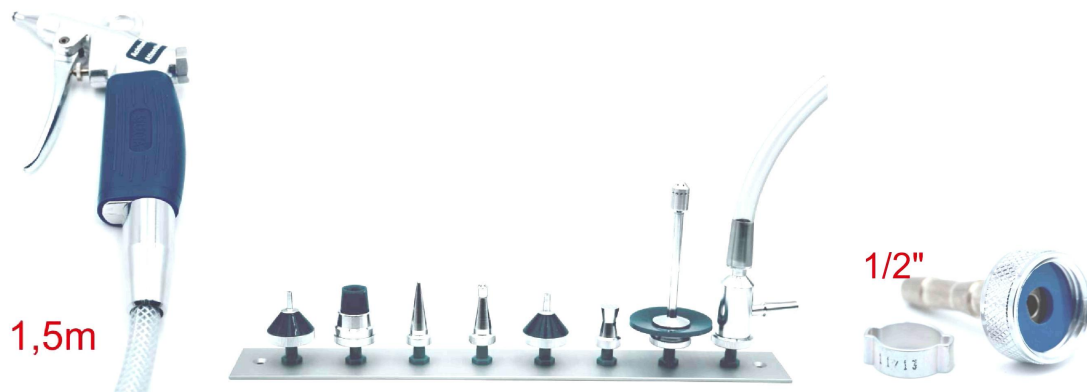

64-20900-01 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell komplett mit 1,5 m langem Schlauch, Konus und Aufsätzen A-H Standard 1/2"



64-20920-01 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 1,6 m Metallschlauch, Konus, Tischverschraubung und 3/4"-Anschluss



64-20920-02 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell ohne Zubehör



1,5m

64-20920-05 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 1,5 m Schlauch und Konus (Schlauchende offen)



3,0m

64-20920-06 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 3,0 m Schlauch und Konus (Schlauchende offen)



64-20620-03

1 St. Ansatz D "Record" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-04

1 St. Ansatz E "Pipetten" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-05

1 St. Ansatz A "Katheter" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-06

1 St. Ansatz B "Drainage" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-07

1 St. Ansatz F "Luer-Lock" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-08

1 St. Ansatz C "Brause" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-09

1 St. Ansatz G "Flaschenspüler" für SELECTA Reinigungspistole




64-20620-10 1 St. Ansatz H "Wasserstrahler" für SELECTA Reinigungspistole




64-20621-00 1 St. Tischrosette 54 mm mit Konus



64-20621-01 1 St. Tischrosette 54 mm mit Mutter ohne Konus

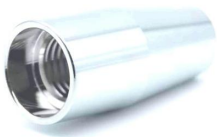

64-20621-02 1 St. Schraubkonus

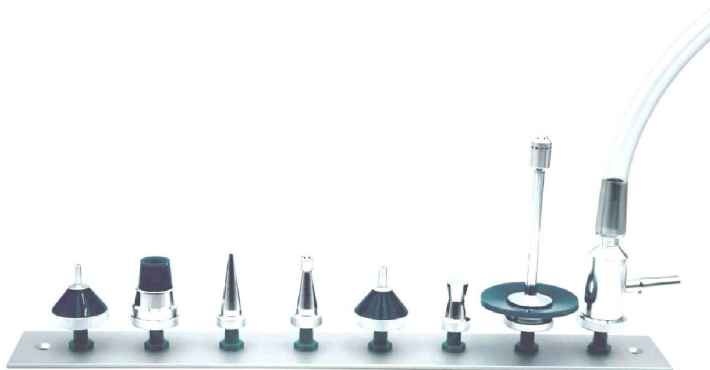

64-20620-20 1 St. Standardset A-H mit Leiste



64-20620-21 1 St. Aufsteckleiste 8-fach komplett mit 2 Schrauben



64-20630-09 1 St. Verschraubung 3/4" komplett



64-20630-10 1 St. Verschraubung 1/2" komplett



64-20630-25 1 St. Druckluftstecker DIN 13260



64-20630-27 1 St. Druckminderer AIR / Druckluft zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle mit regelbarem Ausgangsdruck

Ersatz- und Verschleissteile



64-20630-01 1 St. Pistolenspitze



64-20630-02 10 St. O-Ring (1VE) 3x1



64-20630-03 1 St. Spiral Spannstift



64-20630-04 1 St. Hebel



64-20630-06 1 St. Schlauchfülle



64-20630-07 1 St. Verschlusskappe



64-20630-08 1 St. Nachrüstatz Dosierung



64-20630-12 1 St. Juridklemme


64-20630-13 1 St. Einbindehülse



64-20630-14 1 St. PVC-Schlauch (Meterware)



64-20630-15 1 St. Griff für Pistole

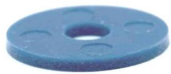

64-20630-16 1 St. Dichtung 3/4"



64-20630-17 1 St. Dichtung 1/2"

64-20630-18 1 St. Dichtscheibe

64-20630-19 1 St. Schlauchtülle

64-20630-20 1 St. Reduzierring 1/2" und Perlator

64-20630-21 1 St. Reduzierring 1/2" und 3/8"



64-20630-22 1 St. Mantelhaken



64-20630-23 1 St. Metallschlauch mit Tülle 3/4", 1,6 m

Shark-Waschpistolen (nicht für VE-Wasser geeignet)

NICHT AUFBEREITBAR




- | | |
|--------------------|--|
| 64-20200-15 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-25 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-35 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-45 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-55 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-65 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-75 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-85 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |

Shark-Waschbrausen (nicht für VE-Wasser geeignet)



- | | |
|--------------------|---|
| 64-20100-10 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-20 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-30 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-40 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-50 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-60 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-70 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-80 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |

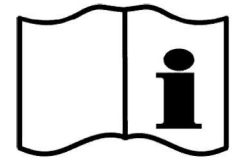

Gebrauchsanweisung für Edelstahl Reinigungspistolen Systeme*



REF 64-20820-xx Druckluft-RPS-Set mit Schnellverschlusskupplung

REF 64-20810-xx VE-Wasser-RPS-Set / Trinkwasser-RPS-Set mit Schnellverschlusskupplung

1. Verwendungszweck der Reinigungspistolensysteme (RPS)

REF 64-20820-xx Druckluft-RPS-Set mit Schnellverschlusskupplung

Zum Ausblasen von Medizinprodukten mit medizinischer Druckluft bis 0,5Mpa (= 5bar) zur Aufbereitung im reinen und unreinen Bereich.

REF 64-20810-xx VE-Wasser-RPS-Set / Trinkwasser-RPS-Set mit Schnellverschlusskupplung

Zum Ausspülen von verschmutzten Medizinprodukten mit kaltem VE-Wasser bzw. Trinkwasser bis 0,5Mpa (= 5bar) zur Aufbereitung im reinen und unreinen Bereich.

Für dieses Produkt besteht keine Einweisungspflicht.

* Reinigungspistolensystem, nachfolgend **RPS** genannt

2. Aufbereitungsintervalle

Die Reinigungspistole sowie Düsen, Ansätze und Kupplungsschutzkappe müssen vor dem erstmaligen Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden! Die Reinigung und Sterilisation der Reinigungspistole muss zerlegt erfolgen! Die Aufbereitungsintervalle sind vom Anwender je nach Einsatzzweck und Häufigkeit der daraus folgenden Kontamination und Verschmutzung des RPS selbst festzulegen. Nach einer Kontamination muss die Reinigungspistole und das betroffene Zubehör sofort aufbereitet werden! Die "Schlauchereinheit" (Schlauch, Kupplung, Schlauchanschlussadapter) sind **keine** Medizinprodukte und können bei Kontamination des Fördermediums nicht aufbereitet werden. Wir empfehlen je nach Einsatzzweck mikrobiologische Kontrollen durchzuführen.

3. Zerlegen der Reinigungspistole zur Aufbereitung

(Die aufgezogenen O-Ringe müssen nicht entfernt werden)



1. Verschlusskappe durch Linksdrehung vom Pistolenkörper lösen.
2. Kolbenfeder entfernen
3. Abzughebel zurückziehen und den Kolben nach hinten herausziehen.
4. Düsen durch Linksdrehung von der Düsenkappe lösen.
5. Düsenkappe durch Linksdrehung vom Pistolenkörper lösen.
6. Handgriff durch Linksdrehung vom Pistolenkörper lösen.
7. Brausedüsen Sieb durch Linksdrehung vom Brausedüsenkörper lösen.
8. Abzughebel durch Aufklappen und Herausnehmen des Abzughebelverschlussstiftes abnehmen.

4. Aufbereitung der Reinigungspistole, Düsen, Ansätze und Kupplungsschutzkappe¹

(Die aufgezogenen O-Ringe müssen zur Aufbereitung nicht entfernt werden)

Gemäß den Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien durch qualifiziertes Fachpersonal nach den jeweils aktuellen RKI-Empfehlungen. www.rki.de. Die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers (Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter) sind einzuhalten. Außerdem ist geeignete Schutzkleidung, die den Anforderungen der zuständigen Berufsgenossenschaft entspricht, zur Aufbereitung zu tragen. Die Validierungen zur Reinigung/Desinfektion und Sterilisation Berichtsnummer 8739 und 8740 des RPS wurde mit folgendem Präparat und Reinigungsgeräten durchgeführt:

Instrumentenreiniger: neodisher MediClean forte (Alkalisches Reinigungsmittel mit Tensiden)
 Hersteller Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.KG – Hamburg / Internet: www.drweigert.de

4.1 Vorreinigung: Instrumentenreiniger: neodisher MediClean forte 2%ige Lösung bis maximal 40°C

- a. Das RPS zerlegen (Siehe „Zerlegen der Reinigungspistole zur Aufbereitung“). Die Einzelteile der Reinigungspistole in eine Wanne mit der Reinigungslösung neodisher MediClean forte 2%ig einlegen und unterhalb des Flüssigkeitsspiegels mit einer weichen Bürste oder Tuch von allen sichtbaren Verschmutzungen reinigen.
- b. Die mit Reinigungslösung blasenfrei gefüllten RPS-Teile müssen bei starker Verschmutzung (Proteinbelastung z.B. Blut) für 15 Minuten in der Wanne eingelegt bleiben. Die Reinigungslösung muss mindestens einmal täglich oder bei sichtbarer Verunreinigung sofort erneuert werden.
- c. Unter fließenden, kalten Wasser (Trinkwasserqualität), das frei von pathogenen Keimen ist, werden alle RPS-Teile vor der anschließenden Ultraschallreinigung ab- und durchgespült.

4.2 Ultraschallreinigung: Unbedingt erforderlich!

Instrumentenreiniger: neodisher MediClean forte 2%ige Lösung bis maximal 40°C, Dauer 10 Minuten

Das verwendete Ultraschallgerät muss zur Reinigung für medizinische Instrumente geeignet sein und sollte eine Frequenz von 35-40kHz aufweisen. Bei Geräten mit höherer Frequenz erhöht sich die Reinigungszeit! Wichtig: Sobald das Ultraschallreinigungsgerät eingeschaltet wird, erwärmt sich die Reinigungslösung im Ultraschallbad. Um eine Erwärmung der Reinigungslösung über 40°C zu vermeiden, sollte daher auf eine zusätzliche Heizung im Ultraschallbad verzichtet werden.

Die RPS-Teile müssen mit Reinigungslösung bedeckt und alle Hohlräume gefüllt sein.

Ultraschallkörbe dürfen nicht überladen werden, da sonst Schallschatten entstehen und die Reinigungswirkung nicht gewährleistet ist!

Die Reinigungslösung muss mindestens einmal täglich oder bei sichtbarer Verunreinigung sofort erneuert werden.

4.3 Abspülen - Durchspülen

Mit kaltem Wasser (Trinkwasserqualität), das frei von pathogenen Keimen ist, werden alle RPS-Teile ab- und durchgespült. Reinigungswirkung überprüfen!

4.4 Anschließend Maschinenreinigung der Einzelteile mit: RDG Typ Miele G7835 CD – Spülprogramm Des-Var-TD.

Pistolen-Körper, Handgriff und Düsen an das Hohlraumspülssystem anschließen. Düsenansatzkappe, Verschlusskappen, Handgriff Überwurfmutter, Brausedüsen Sieb, Kolben und Kolbenfeder in ein Spülsieb mit Abdeckung einlegen und auf dem Einlegesieb unten im Wagen platzieren.

Programmablauf:

Vorspülen	Kaltes Wasser mit Trinkwasserqualität	10°C	1 Minute
Reinigung	Neodisher Mediclean forte, alkalisch 0,5% (Wasser mit Trinkwasserqualität)	55+/-5°C	5 Minuten
Neutralisation	Neodisher Z 0,1% (Wasser mit Trinkwasserqualität)	10°C	2 Minuten
Spülen	Deionisiertes Wasser	10°C	1 Minute
Thermische Desinfektion	Deionisiertes Wasser	>90°C	5 Minuten
Trocknung	Temperatureinstellung am Gerät	80°C	30 Minuten

4.5 Entnahme der gereinigten RPS-Teile aus dem RDG

Die gereinigten RPS-Teile nach Ablauf des Reinigungsvorganges mit Einmalhandschuhen ohne weitere Kontamination aus dem RDG entnehmen. Die Reinigung und Trocknung der RPS-Teile überprüfen. Falls keine vollständige Reinigung erfolgt ist, müssen die entsprechenden Reinigungsschritte wiederholt werden bzw. eine Nachtrocknung mit Druckluft für medizinische Zwecke erfolgen.

4.6 Vorbereitung der RPS-Teile zur Dampfsterilisation

Die vollständig gereinigten und getrockneten RPS-Teile auf eventuelle Schäden überprüfen. (siehe Punkt 4.8)
Die Sterilisation muss zerlegt in einer Einfach-Klarsichtsterilisierverpackung entsprechend der Europäischen Norm EN 868-5 erfolgen.

4.7 Sterilisation der Reinigungspistole

Dampfsterilisation: Sterilisatorklasse B - EN13060 - Fraktioniertes Vorvakuum - Temperatur 134°C - Mindesthaltezeit 5 Minuten
Bei der Beladung der Sterilisationskammer sind die Richtlinien der Sterilisations-Gerätehersteller einzuhalten.
Die Lagerfähigkeit nach erfolgter Sterilisation ist vom verwendeten Aufbewahrungsbehältnis abhängig.
Bitte Herstellerangaben beachten! Nach einer Kontamination mit Krankheitserregern, welche durch das von Ihnen angewandte Sterilisationsverfahren nicht abgetötet werden können, dürfen die RPS-Teile nicht wieder verwendet werden.

4.8 Überprüfung der RPS-Teile nach der Sterilisation

Das RPS darf nicht verwendet werden wenn:

- Die RPS-Teile nicht ordnungsgemäß gereinigt und sterilisiert sind.
- Teile der Reinigungseinheit verbogen, mit Rost befallen oder Gewindedefekte aufweisen.
- O- Ringe oder Dichtungsscheiben fehlen oder beschädigt sind.

Der Einsatz des RPS erfolgt in Eigenverantwortung. Sollten bei der Überprüfung Mängel, auch wenn diese hier nicht erwähnt sind, festgestellt werden, darf das RPS nicht verwendet werden.

5. Montage der Reinigungspistole nach der Sterilisation



Überprüfen Sie bitte vor der Montage, ob alle abgebildeten Dichtungsringe vorhanden und intakt sind!
Alle Teile **durch Rechtsdrehung handfest** verschrauben.

Bei Verwendung der Reinigungspistole mit Druckluft und Wasser:

1. Den vorderen Kolbenbereich und den kleinen Kolben O-Ring zur Montage mit **reinem Silikonöl** einölen!
Dabei sollte der Ölfilm möglichst dünn aufgetragen werden (Minimalschmierung!).
Trockenes Einschieben zerstört die Kolbendichtung!
Anschließend den Kolben in den Pistolenkörper schieben, die Kolbenfeder über den Kolben schieben, und die Verschlusskappe auf den Pistolenkörper schrauben.
2. Die Düsenkappe vorne auf den Pistolenkörper schrauben und die gewünschte Düse in die Düsenkappe schrauben.
3. Den Pistolenhandgriff bis zum Anschlag in den Pistolenkörper schrauben.
4. Den Stecknippel des Handgriffes DN7,2 mit reinem Silikonöl einölen, falls dieser sich schwer in die Edelstahlkupplung einschieben oder entfernen lässt.
5. Den Abzughebel in den Pistolenkörper stecken und mittels Abzughebel-Verschluss-Stift fixieren und durch Abklappen arretieren.

Hinweis: Das mitgelieferte Silikonöl SLC-2000 der Fa. Fujinon ist nicht steril.

Achtung: Öle, die Weißöl bzw. Parafinöl enthalten, zerstören die Dichtungsringe.

Hinweis: Lässt sich der RP-Kolben trotz Einölen schwer aus dem Pistolenkörper entfernen bzw. einschieben, muss der RP-Kolben O-Ring klein REF 64-20850-24 erneuert werden. (Siehe Teileübersicht Seite 7)

Bitte beachten: Die Wasser- bzw. Druckluftzuleitung muss bei Nichtgebrauch und bei Montagearbeiten an der Reinigungspistole stets unterbrochen werden und anschließend der Druck im System über die Reinigungspistole durch Betätigung des Abzughebels abgelassen werden. Vor jedem Öffnen der Druckleitung muss das komplette System auf Schäden überprüft werden!
Nach dem Öffnen der Druckleitung ist das komplette System auf Dichtigkeit zu überprüfen!

6. Reinigungspistolen-Sets: 64-20810-xx / 64-20820-xx

Montage der Reinigungspistole mit der Pistolenkupplung

1. Den Pistolengriff mit Kupplungsstecker DN7,2 gerade in die Pistolenkupplung einführen und soweit eindrücken, bis dieser hörbar einrastet.
2. Die Druckzufuhr öffnen und das komplette System auf Dichtigkeit überprüfen!

Entfernen der Reinigungspistole von der Pistolenkupplung

1. Um die Reinigungspistole zur Aufbereitung wieder von der Kupplung zu trennen, muss die Druckzufuhr unterbrochen werden.
2. Den im Schlauch befindlichen Druck über die Pistole durch Drücken des Abzughebels ablassen.
3. Den Pistolengriff in die Kupplung drücken, gleichzeitig den Schiebering an der Kupplung in Richtung Schlauch ziehen und die Pistole aus der Kupplung ziehen.
4. Die sterile Kupplungsschutzkappe über die Pistolenkupplung stülpen.
5. Der Schlauch ist so zu lagern, dass dieser nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt und nicht kontaminiert werden kann.
Die Reinigung und Sterilisation der Kupplungsschutzkappe erfolgt wie bei den Reinigungspistoleteilen.

7. Wandhalter für die Reinigungspistole

Der Wandhalter für die Reinigungspistole ist so zu platzieren, dass eine Kontamination der Pistoleneinheit bei Nichtgebrauch vermieden wird.
Die Befestigungsschraube und der Dübel für den Wandhalter sind dem Untergrund anzupassen und müssen einen festen Halt gewährleisten.
Daher sind die mitgelieferten Befestigungsmittel nicht in jedem Falle verwendbar.

8. Düsenständer – Tischmodell / Wandmodell

Auf den Düsenständer können bis zu 7 Düsen aufgesteckt werden.
Die Reinigung und Sterilisation des Düsenständers erfolgt wie bei den Reinigungspistoleteilen.
Die Aufbereitung erfolgt ohne Düsen.

9. Installation der Reinigungspistoleinheit

Die Installation der Reinigungspistole mit Schlauch, Schlaucharmaturen und Schlauchkupplungen („Reinigungspistoleinheit“) ist entsprechend dem Verwendungszweck (1.) durch einen Fachbetrieb auszuführen.

10. Schlauch, Schlauchkupplung und Schlauchanschlussadapter

Schlauch, Schlauchkupplung und Schlauchanschlussadapter (Schlaucheinheit) sind **keine Medizinprodukte**.
Je nach Verwendungszweck, Zustand und Einsatzdauer sollte die Schlaucheinheit in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
Die Zeitintervalle sind vom Betreiber selbst festzulegen.
Die „Schlaucheinheit“ darf bei Beschädigung, Undichtigkeit oder Kontamination des Fördermediums nicht weiter verwendet werden.

Schlauchmaterialien und Maximaldruck: Siehe unter Technische Daten.

Die Schlauchlänge ist so zu wählen, dass der zulässige Biegeradius von 60mm bei der Montage und während des Betriebs des Schlauches nicht unterschritten wird. Bei gebogener Verlegung muss genügend Schlauchlänge zur Bildung eines offenen Bogens vorhanden sein, da sonst der Schlauch an den Anschlüssen abgeknickt und zerstört wird. Die flexible Verbindung darf auf keinen Fall verdreht oder abgeknickt werden. Der Schlauch darf sowohl bei der Montage als auch während der Anwendung mit keinerlei von außen einwirkenden Zug- oder Druckbeanspruchung belastet werden. Für die Dichtheit der Verbindung (Schlauch/Anschluss) ist grundsätzlich der Monteur der Schläuche verantwortlich. Da uns die Geometrie und das Material der Gegenstücke nicht bekannt sind, muss das mitgelieferte Dichtungsmaterial vom Monteur auf seine Eignung überprüft werden.
Die Gewährleistung tritt nur bei einer fachgerechten Installation unter Berücksichtigung aller Normen und Verordnungen in Kraft.

11. Sicherheits- u. Gefahrenhinweise für die Benutzung der Reinigungspistoleinheit

Bei jeder Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass alle Verbindungsstellen der Reinigungspistoleinheit fest verbunden und dicht sind.

Die Wasser- bzw. Druckluftzuleitung muss bei Nichtgebrauch und bei Montagearbeiten an der Reinigungspistoleinheit stets unterbrochen werden und anschließend der Druck im System über die Reinigungspistole durch Betätigung des Abzughebels abgelassen werden.

Vor jedem Öffnen der Druckleitung muss das komplette System auf Schäden überprüft werden!

Nach dem Öffnen der Druckleitung ist das komplette System auf Dichtigkeit zu überprüfen!

Der Benutzer muss vor Sprühnebel geschützt werden (Brille, Maske, Spritzwand Kleidung usw.).

Ferner sind alle weiteren Sicherheitsbestimmungen Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft für den sicheren Betrieb der Reinigungspistole einzuhalten.

Die Düsen an der Reinigungspistole müssen fest mit der Düsenkappe verbunden sein.

12. Überprüfung des RPS vor dem Einsatz durch den Anwender

Das RPS darf nicht verwendet werden wenn:

- Das RPS nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Das RPS nicht ordnungsgemäß gereinigt und sterilisiert ist.
- Die Reinigungseinheit Schäden oder Undichtigkeiten aufweist.
- Teile der Reinigungseinheit verbogen, mit Rost befallen oder Gewindedefekte aufweisen.
- O- Ringe oder Dichtungsscheiben fehlen oder beschädigt sind.

Der Einsatz des RPS erfolgt in Eigenverantwortung. Sollten bei der Überprüfung Mängel, auch wenn diese hier nicht erwähnt sind, festgestellt werden, darf das RPS nicht verwendet werden.



Pistolenkupplung

Kupplungs-
schutzkappe



Wandhalter



13. Technische Daten

Medium: Druckluft medizinisch aufbereitet / Wasser kalt / VE-Wasser kalt
(Abhängig vom verwendeten Schlauchmaterial)

Entnahmestelle - Maximal Druck: Entnahmestelle (=Pistolenschlauch-Anschlussstelle) 0,5Mpa (=5 bar)

Materialien:

Reinigungspistole: Edelstahl 1.4404 / Kolbenfeder 1.4571
Abzughebelarretierungsring: Edelstahl 1.4310
Kolben: Kunststoff - PEEK USP Class VI
Düsen: Edelstahl 1.4404 / Brausedüsensieb: Kunststoff - USP Class VI
Luer-Lock Ansatz – Messing verchromt

Schnellverschlusskupplung*: Edelstahl 1.4404 / Federn 1.4571/ Verriegelungsstifte 1.4310
Flachdichtung Kupplung/Schlauch: EPDM - KTW -Zulassung
Kupplungsschutzkappe Kunststoff - FDA -Zulassung
Schlauchverschlusskappe Edelstahl 1.4404
Schlauchanschlussadapter Edelstahl 1.4404 – Flachdichtung KTW-Zulassung
Düsenständer Grundplatte Edelstahl 1.4301 / Aufsteckdorne 1.4310 / Füße Kunststoff FDA Zulassung / Befestigungsschrauben 1.4301

Schmierstoff: Siliconöl SLC 2000 der Fa. Fujinon (nicht steril)

Hinweis: Der vordere Kolbenbereich mit dem kleinen Kolben-O-Ring müssen nach jeder Aufbereitung mit Silikonöl benetzt werden (Minimalschmierung)! Die O-Ringe im Inneren der Schnellverschlusskupplung werden bei der Montage mit Silikonöl benetzt.

Konformitäten/Zulassungen für die verwendete EPDM O-Ringe:

(Reinigungspistole, Kolben, Düsen, Ansätze, Schlauchverschlusskappe und Schnellverschlusskupplung):
EU 65/2011 (RoHS); EC 95/2002 (RoHS); EC 11/2003; FDA; EC 2023/2006; EC1935/2004 article 3; BfR XXI Kategorie 4; ADI free;
ACS; WRAS; USP Class VI; UBA; ÖNORM; NSF 61; NSF 51; KIWA; DVGW W270; DVGW W534; EN 681-1; AS/NZS 4020;
3-A Sanitary Standard; GB 4806.11-2016

Druckluftschlauch*: PVC-Gewebeschauch mit KTW-C / FDA (21 CFR §170 - §190) (§175.300) Zulassung
Innendurchmesser 6mm / Außendurchmesser 12mm

Schlaucharmatur: Aluminium eloxiert
Schlauchausgang: Aussengewinde 1/2“
Schlaucheingang: Offen, der entsprechende Anschluss muss vom Betreiber gestellt werden.

Trinkwasser / VE-Wasserschlauch*: Silikonschlauch mit Edelstahlflechtung und KTW-A / W270/ W543 Zulassung

Schlaucharmaturen: Edelstahl 1.4404
Schlauchausgang: Aussengewinde 1/2“
Schlaucheingang: 3/8“ Überwurfmutter - Flachdichtung KTW-Zulassung

***Zur Aufbereitung liegen vom Hersteller keine Angaben vor.**

Wasser-Durchflussmenge bei 0,35Mpa (=3,5 bar)

Spitzdüse-Bohrung D1mm ca.0,75Liter/Min (Andere Bohrungsdurchmesser auf Anfrage lieferbar)
Luer-Ansatz / Luer-Lock Ansatz ca. 5,0 Liter/Min
Schlauchdüse ca. 6,2 Liter/Min
Brausedüse ca. 6,0 Liter/Min
Ohne Düse ca. 6,4 Liter/Min

Luft-Durchflussmenge bei 0,35Mpa (=3,5 bar)

Spitzdüse-Bohrung D1mm ca. 35 Liter/Min (Andere Bohrungsdurchmesser auf Anfrage lieferbar)
Luer-Ansatz / Luer-Lock Ansatz ca. 230 Liter/Min
Schlauchdüse ca. 300 Liter/Min
Brausedüse ca. 270 Liter/Min
Ohne Düse ca. 350 Liter/Min

14. Gewährleistung

Edelstahlteile und Schlauch 1 Jahr.
Die O-Ringe sind Verschleißteile und unterliegen keiner Gewährleistung.
Farbliche Veränderungen an Kunststoffteilen sowie Schäden durch Gewalteinwirkung sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden von uns nur anerkannt, wenn die von uns mitgelieferten Gebrauchsanweisungen eingehalten worden sind.

15. Entsorgung


Entsorgung des RPS nach nationalen Gesetzesvorgaben !

16. Richtlinienkonformität

Dieses Medizinprodukt ist nach MDD 93/42/EWG und MDR 2017/745 mit einem CE-Kennzeichen versehen.



17. Reinigungspistolenteile

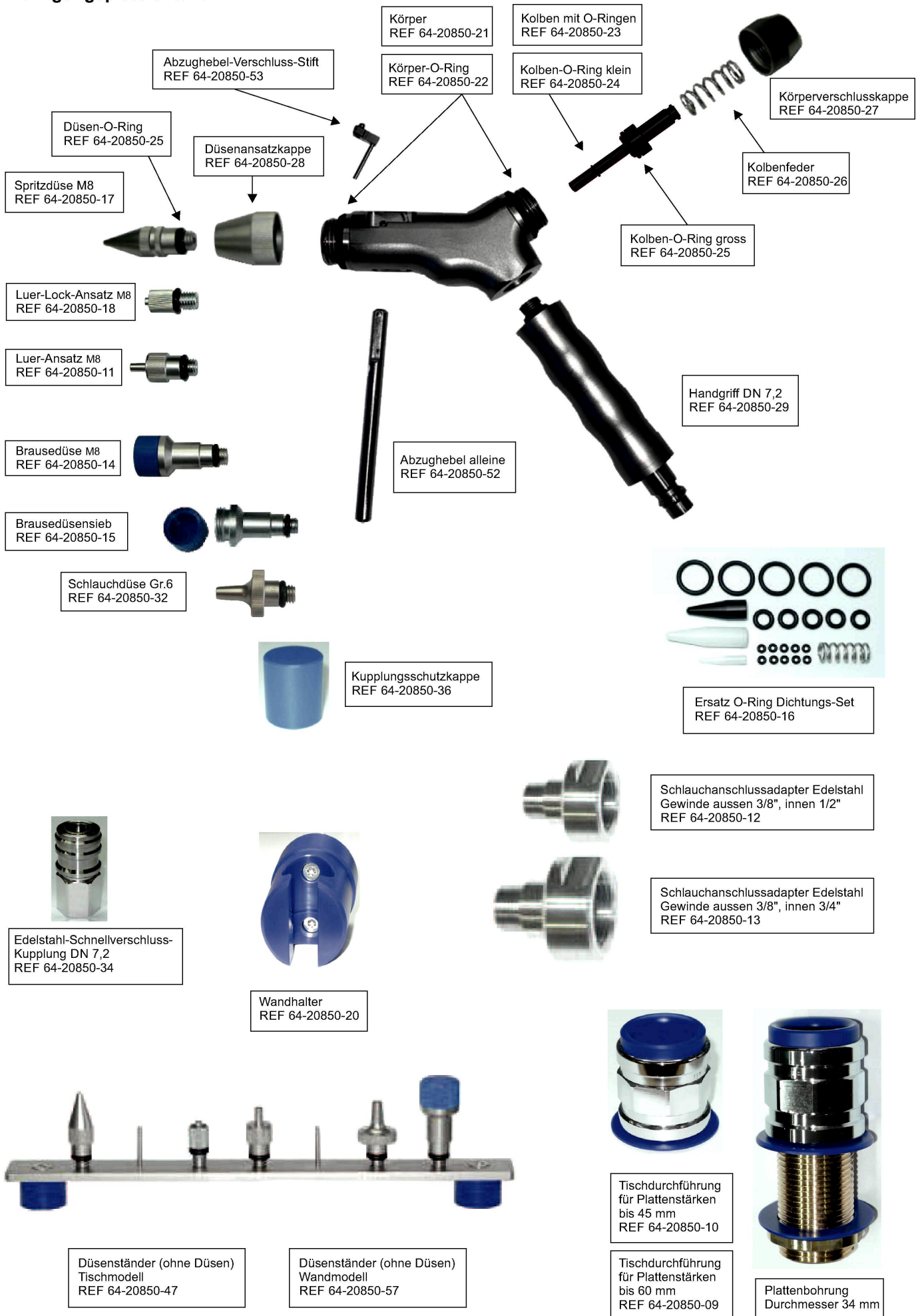

Technische Spezifikation Edelstahl-Reinigungspistolen „TS“

1. Geltungsbereich

Die TS definiert abschließend den Liefer- und Leistungsumfang und dessen Beschaffenheit von RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG. Die darin nicht aufgeführten Beschaffenheitsmerkmale sind nicht Gegenstand der Sachmängelhaftung.

2. Verwendungszweck

REF 64-20820-00 / REF 64-20825-00 Reinigungspistolen zum Ausblasen von Instrumenten mit medizinischer Druckluft bis 0,5Mpa (= 5bar) zur *Aufbereitung*
REF 64-20810-00 / REF 64-20815-00 Reinigungspistolen zum Ausspülen von Instrumenten mit Trinkwasser (kalt) und VE-Wasser (kalt) bis 0,5Mpa (= 5bar) zur *Aufbereitung*.

3. Aufbereitung der Edelstahl-Reinigungspistole

Die Validierungen zur Reinigung/Desinfektion und Sterilisation Berichtsnummer 8739 und 8740 des RPS wurde mit folgendem Präparat und Reinigungsgeräten durchgeführt:

Instrumentenreiniger: neodisher MediClean forte (Alkalisches Reinigungsmittel pH 10,4 bis 10,8 bestimmt in vollentsalztem Wasser)

Hersteller Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.KG, Hamburg: www.drweigert.de

Ultraschallreinigungsbecken (Frequenz 35-40kHz), RDG Typ Miele G7835 CD – Spülprogramm Des-Var-TD

Dampfsterilisation: Sterilisatorklasse B – EN13060 - Fraktioniertes Vorvakuum – Temperatur 134°C – Mindesthaltezeit 5 Minuten

Eine Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen ist jeder Edelstahl-Reinigungspistole beigelegt. Für dieses Produkt besteht keine Einweisungspflicht.

4. Installation der Reinigungspistoleinheit

Die Installation der Reinigungspistole mit Schlauch, Schlaucharmaturen, Schlauchkupplung und Schlauchadapter („Reinigungspistoleinheit“) ist entsprechend dem Verwendungszweck (2.) durch einen Fachbetrieb auszuführen.

5. Schlauch der Reinigungspistoleinheit

Der Schlauch, Schlauchkupplung und Schlauchanschlussadapter (Schlaucheinheit) sind **keine Medizinprodukte**. Je nach Verwendungszweck, Zustand und Einsatzdauer sollte die Schlaucheinheit in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Die Zeitintervalle sind vom Betreiber selbst festzulegen. Die „Schlaucheinheit“ darf bei Beschädigung, Undichtigkeit oder Kontamination des Fördermediums nicht weiter verwendet werden. **Die Schlauchlänge ist so zu wählen, dass der zulässige Biegeradius von 60mm bei der Montage und während des Betriebs des Schlauches nicht unterschritten wird.** Bei gebogener Verlegung muss genügend Schlauchlänge zur Bildung eines offenen Bogens vorhanden sein, da sonst der Schlauch an den Anschlüssen abgeknickt und zerstört wird. Die flexible Verbindung darf auf keinen Fall verdreht oder abgeknickt werden. Der Schlauch darf sowohl bei der Montage als auch während der Anwendung mit keinerlei von außen einwirkenden Zug- oder Druckbeanspruchung belastet werden. Für die Dichtheit der Verbindung (Schlauch/Anschluss) ist grundsätzlich der Monteur der Schläuche verantwortlich. Da uns die Geometrie und das Material der Gegenstücke nicht bekannt sind, muss das mitgelieferte Dichtungsmaterial vom Monteur auf seine Eignung überprüft werden.

6. Sicherheits- u. Gefahrenhinweise für die Benutzung der Reinigungspistoleinheit

Bei jeder Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass alle Verbindungsstellen der Reinigungspistoleinheit fest verbunden und dicht sind.

Die Wasser- bzw. Druckluftzuleitung muss bei Nichtgebrauch und bei Montagearbeiten an der Reinigungspistoleinheit stets unterbrochen werden und anschließend der Druck im System über die Reinigungspistole durch Betätigung des Abzughebels abgelassen werden. Vor jedem Öffnen der Druckleitung muss das komplette System auf Schäden überprüft werden! Nach dem Öffnen der Druckleitung ist das komplette System auf Dichtheit zu überprüfen!

Der Benutzer muss vor Sprühnebel geschützt werden (Brille, Maske, Spritzwand Kleidung usw.). Ferner sind alle weiteren Sicherheitsbestimmungen Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft für den sicheren Betrieb der Reinigungspistole einzuhalten. Die Düsen an der Reinigungspistole müssen fest mit der Düsenkappe verbunden sein.

7. Technische Daten

Medium: Druckluft medizinisch aufbereitet / Wasser kalt / VE-Wasser kalt

Entnahmestelle (=Pistolschlauch-Anschlussstelle) - Maximal Druck: 0,5Mpa (=5 bar)

7a. Reinigungspistole: Edelstahl 1.4404 / Kolbenfeder 1.4571 / Kolben Kunststoff schwarz - PEEK USP Class VI
7b. Düsen: Edelstahl 1.4404 / Brausedüsensieb: Kunststoff – USP Class VI / Luer-Lock Ansatz: Messing verchromt
7c. Abzughebelarretierungsring: Edelstahl 1.4310
7d. Kupplungsschutzkappe: Kunststoff - FDA – Zulassung
7e. Schlauchverschlusskappe: Edelstahl 1.4404
7f. Schlauchanschlussadapter: Edelstahl 1.4404 – Flachdichtung KTW-Zulassung
7g. Düsenständer: Grundplatte Edelstahl 1.4301 / Aufsteckdome 1.4310 / Füsse Kunststoff FDA-Zulassung / Befestigungsschrauben 1.4301
Temperaturbeständigkeit 7a-7g: Dampf bis 134°C – Reinigungsmittelbeständigkeit 7a-7g: alkalisch pH 10,4 -10,8

Schnellverschlusskupplung *: Edelstahl: 1.4404 / Federn 1.4571/ Verriegelungsstifte 1.4310 / Dichtungsscheibe Kupplung/Schlauch : EPDM - KTW –Zulassung

Schmierstoff:

Silikonöl SLC 2000 der Fa. Fujinon (nicht steril)

Hinweis: Der vordere Kolbenbereich mit dem kleinen Kolben-O-Ring müssen nach jeder Aufbereitung mit Silikonöl benetzt werden (Minimal-Schmierung)! Die O-Ringe im Inneren der Schnellverschlusskupplung werden bei der Montage mit Silikonöl benetzt!

Konformitäten/Zulassungen für die verwendete EPDM O-Ringe: (Reinigungspistole, Kolben, Düsen, Schlauchverschlusskappe und Schnellverschlusskupplung):

EU 65/2011 (RoHS); EC 95/2002 (RoHS); EC 11/2003; FDA; EC 2023/2006; EC1935/2004 article 3; BfR XXI Kategorie 4; ADI free;ACS; WRAS; USP Class VI; UBA; ÖNORM; NSF 61; NSF 51; KIWA; DVGW W270; DVGW W534; EN 681-1; AS/NZS 4020; 3-A Sanitary Standard; GB 4806.11-2016

Druckluftschlauch *: PVC-Gewebebeschlauch mit KTW-C / FDA (21 CFR §170 - §190) (§175.300) Zulassung. Innendurchmesser 6mm / Außendurchmesser 12mm - Schlaucharmatur: Aluminium eloxiert ;Schlauchausgang: Aussengewinde ½", Schlaucheingang: Offen, der entsprechende Anschluss muss vom Betreiber gestellt werden.

Trinkwasserschlauch / VE-Wasserschlauch *: Silikonsschlauch mit Edelstahlumflechtung und KTW-A / W270/ W543 Zulassung - Schlaucharmaturen: Edelstahl 1.4404 Schlauchausgang: Aussengewinde ½", Schlaucheingang: 3/8" Überwurfmutter

Wasser-Durchflussmenge bei 0,35Mpa (=3,5 bar)

Spitzdüse-Bohrung D1mm	ca.0,75Liter/Min
Luer-Ansatz / Luer-Lock Ansatz	ca. 5,00 Liter/Min
Brausedüse	ca. 6,00 Liter/Min
Schlauchdüse	ca. 6,20 Liter/Min
Ohne Düse	ca. 6,40 Liter/Min

Luft-Durchflussmenge bei 0,35Mpa (=3,5 bar)

Spitzdüse-Bohrung D1mm	ca. 035 Liter/Min
Luer-Ansatz / Luer-Lock Ansatz	ca. 230 Liter/Min
Brausedüse	ca. 270 Liter/Min
Schlauchdüse	ca. 300 Liter/Min.
Ohne Düse	ca. 350 Liter/Min

8. Gewährleistung:

Edelstahlteile,Kolben und Schlauch 1 Jahr. Die O-Ringe sind Verschleißteile und unterliegen keiner Gewährleistung.

Farbliche Veränderungen an Kunststoffteilen sowie Schäden durch Gewalteinwirkung sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden von uns nur anerkannt, wenn die von uns mitgelieferten Gebrauchsanweisungen eingehalten wurden.

9. Entsorgung des RPS nach nationalen Gesetzesvorgaben!

* Zur Aufbereitung liegen vom Hersteller keine Angaben vor.