

Produktinformation



Ultrana Haft-Fix

Spezial-Roll-on-Klebstoff für medizinische Kompressionsstrümpfe



Eigenschaften:

Ultrana Haft-Fix ist ein spezieller Hautkleber zum Befestigen von Kompressionsstrümpfen an Armen und Beinen. Er ist aufgrund seiner Zusammensetzung besonders hautverträglich, hinterlässt keine Flecken und ist mit Wasser mühelos abwaschbar. Das Produkt wurde dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet.

Anwendung:

Der Strumpf wird wie üblich angezogen. Sobald die Länge feststeht, wird der Rand nach unten umgelegt und der Klebstoff auf die Haut aufgetragen. Danach den Rand wieder hochklappen und an die Haut andrücken. Der Strumpf hält dann problemlos ohne weitere Befestigung.

Von Kindern bitte fernhalten, nicht einnehmen und die Rollkugel stets sauber halten. Nach Gebrauch die Flasche wieder gut verschließen, damit der Kleber seine Wirkung bis zum letzten Tropfen behält.

Inhaltstoffe:

PVP/VA Copolymere, Glycerin, Isopropylalkohol

Listung:

Ultrana Haft-Fix ist registriert bei der Informationsstelle für Arzneimittelspezialitäten IFA GmbH unter folgender Pharmazentralnummer:

PZN 60 ml: 3210956
EAN13: 401136800702 6
Hilfsmittel POS.-Nr. 17.06.07.0008

Verpackungseinheit:

Karton 20 Flaschen a 60 ml



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG

Ultrana GmbH

Rosengartenweg 5
D-88348 Bad Saulgau

Münster, 26.08.2013


Zertifikat
über das Produkt
Haft-Fix

Dermatologische Prüfungen am Menschen 2013

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf. Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest® GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatetest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.

BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG