


Ölflaschenerwärmer

Danke, dass Sie sich für unseren Ölflaschenerwärmer entschieden haben. Mit seiner Hilfe haben Sie stets schnell wohltemperiertes Massageöl für Ihre Kunden und Patienten zur Hand. Bitte Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen.

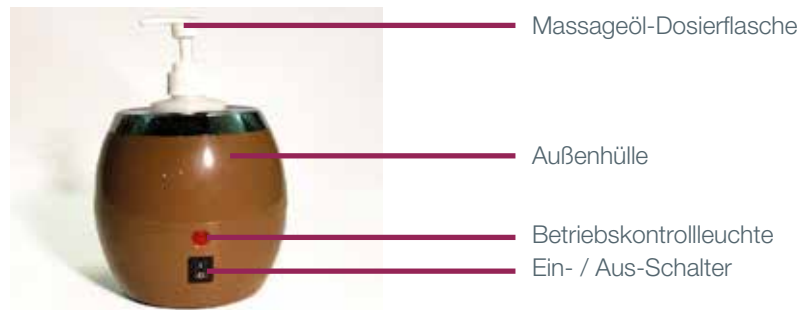

Technische Daten

Leistung	42-50 W
Netzspannung	230 V
Max. Temperatur	60°C
Maße Dosierflasche (Ø x H)	50,8 x 155 mm
Maße Ölflaschenwärmer (Ø x H)	135 x 145 mm

Sicherheitshinweise

	Füllen Sie KEINE Flüssigkeiten direkt in das Gerät. Füllen Sie die Dosierflasche mit Massage-Öl oder -Lotion, bevor Sie das Gerät einschalten.
	Um das Gerät dauerhaft zu erhalten, erwärmen Sie ausschließlich Massageöl, Massagelotion oder Massagecreme.
	Um die Gefahr von elektrischen Schlägen und Kurzschlüssen zu vermeiden, achten Sie unbedingt darauf, dass das Innere des Gerätes trocken und sauber ist. Halten Sie die Dosierflasche immer sauber. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser.
	Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie überprüft haben, dass die mindestens halb gefüllte Dosierflasche im Erwärmer steht. Wenn die Flasche zu voll ist, kann dies zum Auslaufen des Öles führen (Ausdehnung beim Erwärmen).

	Schalten Sie den Ölflaschenerwärmer nur ein, wenn Sie ihn benötigen und schalten ihn ab, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Fassen Sie das Innere des Gerätes nie-mals während des Betriebs an.
	Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern. Der Ölflaschenerwärmer ist KEIN Spielzeug.
	Im Falle eines Defektes, kontaktieren Sie Ihren Händler, um die Reparatur durchzuführen. Schrauben Sie das Gerät auf keinen Fall selbst auf, um Servicearbeiten durchzuführen.
	Verwenden Sie ausschließlich Dosierflaschen aus Glas oder PE (HDPE oder LDPE). Benutzen Sie keinesfalls PET-Flaschen, da der Schmelzpunkt zu niedrig ist. Eine PET Flasche wird schmelzen oder sich stark verformen.

Bedienung

Schritt 1:

Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und stecken den Netzstecker in die Steckdose.

Schritt 2:

Befüllen Sie die Dosierflasche mit einem Massageöl Ihrer Wahl und stellen diese in das Gerät.

Schritt 3:

Schalten Sie den Ölflaschenerwärmer jetzt ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte den korrekten Betrieb anzeigt. Nach 15-20 Minuten ist Ihr Öl auf Temperatur.

Schritt 4:

Überprüfen Sie die Temperatur des Massageöls, bevor Sie es auf Ihrem Kunden verteilen. Schalten Sie das Gerät ab, nachdem Ihr Massageöl die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Wartungshinweise

Der Ölflaschenerwärmer ist ein elektrisches Präzisionsinstrument. Reinigen Sie das Gerät NICHT unter fließendem Wasser oder mit einem nassen Wischtuch. Lassen Sie das Gerät niemals fallen. Lassen Sie das Gerät stets ausgeschaltet, wenn Sie es nicht benötigen. Nur in trockener Umgebung verwenden.