



Compresse de chaud instantané

- aide immédiate en cas de tensions musculaires & de courbatures
- prêt à l'emploi en quelques secondes
- idéal pour la maison & les déplacements
- froid homogène

Remarque:

Pour usage externe uniquement. Usage unique. Toujours poser une serviette entre la compresse et la peau.

Ne pas abîmer la poche extérieure. En cas de contact du contenu avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Ne pas utiliser sur des patients souffrant de troubles sensoriels. Conserver la compresse hors de portée des enfants. N'utiliser pour un enfant que sous la surveillance d'un adulte.

Exemples d'utilisation:

- la compresse est activée en quelques seconde par simple pression et pourra servir aux premiers secours.
- appuyer et casser la bulle à l'intérieur de la compresse - secouer vigoureusement - envelopper dans une serviette et poser sur la zone douloureuse
- la compresse de chaud instantané à usage unique apaise et soulage la douleur en cas de mal de dos, tensions musculaires, courbatures, signes d'usure et rhumatismes non inflammatoires



Compresse de chaud instantané



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation

Produit	Dimensions	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Compresse de chaud instantané	150 x 130 mm		99229	6499229