

Gebrauchsanweisung

EcoKiss Sandwichkissen und Gekissen

Die Spezialkissen für Rollstühle und andere Indikationen.
Die Gekissen sind ideal für die Dekubitus-Prophylaxe.

Indikationen


Druckverteilung und -entlastung insbesondere zur Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie bis einschließlich Dekubitusklasse 1.

Nicht anwenden: Bedingt geeignet bei Dekubitus im fortgeschrittenen Stadium.






Wichtige Hinweise

- Bezug vor dem ersten Gebrauch waschen
- Ein evtl. Abfärben auf Kleidung ist kein Reklamationsgrund und sollte sich nach der ersten Wäsche verlieren
- **Verwenden Sie dieses Kissen nicht als Rückenkissen!**
- Für unruhige Patienten, die auf dem Stuhl hin- und herrutschen, ist dieses Kissen nicht geeignet
- Patienten nicht mit dem Kissen in den Stuhl ziehen, es besteht Walkgefahr bzw. die Möglichkeit einer Beulenbildung. Das Kissen wird dadurch unbrauchbar!
- Um eine lange Lebenszeit des Kissens zu gewährleisten, sollte das Kissen täglich gedreht werden

Materialien

- Innenkern **EcoKiss Sandwichkissen:** Sandwich (Schaumstoff-Gel-Kombination)
- Innenkern **EcoKiss Gekissen:** Gel
- Bezug: Baumwoll-Mischgewebe (BW, PES), rutschfeste Unterseite (Polyurethan-Streifen)
- 

Pflege- und Waschinweise

- Bezug     
- Leichtes Ausbluten beim Waschen ist möglich und kein Reklamationsgrund!
- Den Bezug möglichst separat waschen und vor dem Waschen auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
- **Innenkern EcoKiss Sandwichkissen:** mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
Innenkern EcoKiss Gekissen: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar, jedoch keine alkoholischen Sprühd desinfektionen verwenden
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durchtrocknen lassen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!


Werkmeister GmbH + Co. KG
Eschweger Straße 10 • D-37281 Wanfried



Fon +49 (0) 5655 9899-0 info@werkmeister-gmbh.de
Fax +49 (0) 5655 9899-22 www.werkmeister-gmbh.de
QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485


27.02.12

EcoKiss Sandwichkissen

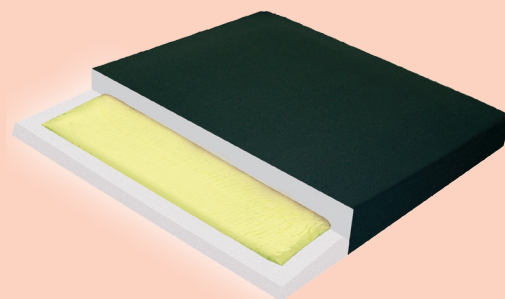

Art. Nr.	Breite/Tiefe/Höhe	Farbe
20150	40 x 40 x 5 cm	Schwarz
20153	40 x 43 x 5 cm	Schwarz
20154	44 x 43 x 5 cm	Schwarz
20151	46 x 43 x 5 cm	Schwarz

EcoKiss Gekissen

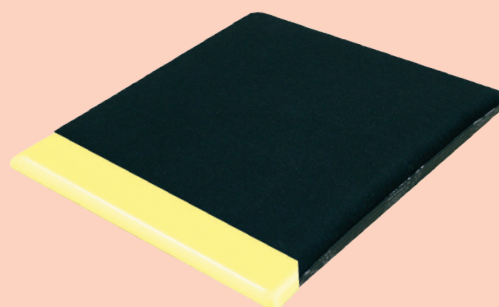

Art. Nr.	Breite/Tiefe/Höhe	Farbe
20156	40 x 40 x 2,5 cm	Schwarz
20157	40 x 43 x 2,5 cm	Schwarz
20158	44 x 43 x 2,5 cm	Schwarz
20159	46 x 43 x 2,5 cm	Schwarz

Werkmeister[®]