



Kalt-/Warm-Kompresse

- wiederverwendbare Kompresse mit Gelfüllung
- passt sich den Körperkonturen flexibel an
- löst Verspannungen & mindert Schwellungen
- schnelle Anwendung
- schmerzlindernd
- wohltuend
- vor der Kalтанwendung ca. 2 Stunden im Gefrierfach aufbewahren
- vor der Warmanwendung Kompresse ca. 4 Minuten in ein heißes Wasserbad legen
- alternativ mikrowellengeeignetes Behältnis mit Wasser füllen, so dass die Kompresse voll bedeckt ist. Die Kompresse mit dem Behältnis ca. 1 Minute in der Mikrowelle erwärmen.

Hinweis:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen. Keine Anwendung länger als 20 Minuten. Zwischen den Anwendungen 30 Minuten pausieren. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden. Eine beschädigte Kompresse nicht mehr verwenden. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Anwendungsbeispiele:

- als Kalt-Kompresse abschwellend und schmerzlindernd bei Prellungen, Verstauchungen, Schwellungen, Blutergüssen,
- Insektenstichen und Zahnschmerzen
- als Warm-Kompresse wohltuend und schmerzlindernd bei Rückenschmerzen, Verspannungen, Muskelkater,
- Abnutzungserscheinungen und nichtentzündlichen Rheumabeschwerden



Kalt-/Warm-Kompresse



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Maße	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Kalt-/Warm-Kompresse	140 x 130 mm		99225	6499225
	200 x 120 mm		99226	6499226
	290 x 120 mm		99227	6499227