

## Technische Datenblätter

Aenderung Nr. 07 vom 22/06/2018  
Mod. 71\_A5\_DE

# PBS 5



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen. Modell entwickelt für Arbeitstationen, wo wenig Abfälle produziert werden (Pflegetablett, Wagen, Arztpraxis, Privathäuser)

- ▶ **Rohstoff:** Umweltfreundlicher Kunststoff (Polypropylene Copolymer mit Cadmiumfreiem Masterbatch gefärbt)
- ▶ **Farbe:** Gelb (Material mit schwermetallfreiem Masterbatch gefärbt) (REACH-Konform)
- ▶ **Form:** Zylinderform
- ▶ **Gewicht:** 365 gr.
- ▶ **Maximale Befüllung:** 2.400 gr.
- ▶ **Volumen:** 5,000 Lt.
- ▶ **Aussenmass:** Ø 214 x 195 h mm (mit Deckel montiert und geschlossen)
- ▶ **Basis:** Ø 182 mm



### LOGISTISCHE DETAILS:

- ▶ **St pro Karton:** 55 (Gefäss mit separatem Deckel)
- ▶ **Verpackungsmass:** 79x53x49 H cm
- ▶ **St pro Palette:** 440 pz.
- ▶ **Palettenmass:** 120x80x212 h cm

### ZERTIFIZIERUNGEN:

- ▶ UN-Zulassung - gemäss auf ADR
- ▶ Konform TRBA 250
- ▶ Kite Mark - Konform gemäss ISO 23907
- ▶ Konform an NFX 30-511
- ▶ Konform Marque NF
- ▶ Konform FDA K071517

## ANWEISUNGEN:

### ► Montage:

Stark auf die Oberfläche des Deckels drücken, bis alle Raster eingehakt sind.



### ► Provisorischer Verschluss:

Der Behälter kann provisorisch geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach oben schliessen.



## GEBRAUCHSANLEITUNGEN:

► Während des Gebrauchs, schliessen Sie den Deckel provisorisch.



### Wichtig!

Bevor den Behälter zu gebrauchen, drücken Sie auf die Sicherheitslamelle, um die Einführung der Abfällen zu erleichtern. Die Lamelle verhindern das Rücklauf der entsorgten Materialien.



### ► Endgültiger Verschluss:

Der Behälter kann endgültig geschlossen werden: man soll die Kappe mit der konkaven Seite nach unten schliessen.



► Wenn der Behälter voll ist, schliessen Sie den Deckel endgültig.




- Breite Öffnung für die Entsorgung verschiedener Abfalltypen, z.B. Teströhrchen, Skalpelln, u.s.w.
- Der Behälter kann auf 134° für 18' autoklaviert werden
- Wenn der Behälter voll ist, muss den verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden keine giftige Gase freigesetzt.

## ► Nadelentsorgung:


Benutzen Sie die spezielle Öffnung für die Nadelentnahme

Benutzen Sie die Öffnung in Form einer Blume um die Insulinkanüle abzuschrauben.

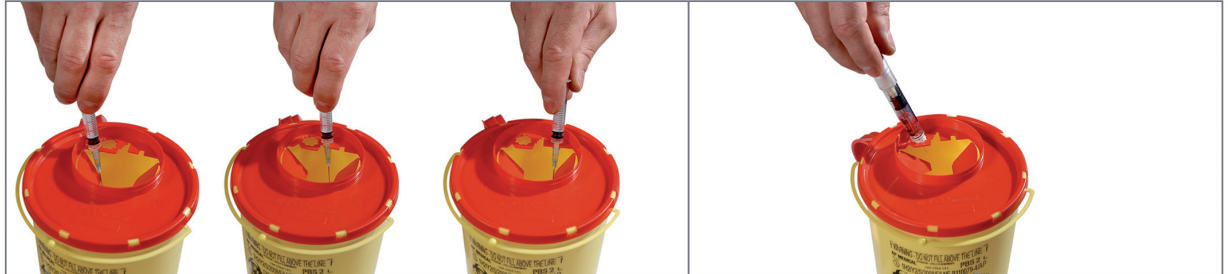

## HALTERUNGEN:

► Zange-Halterung für Verwendung auf der Wand oder auf der Wagen.

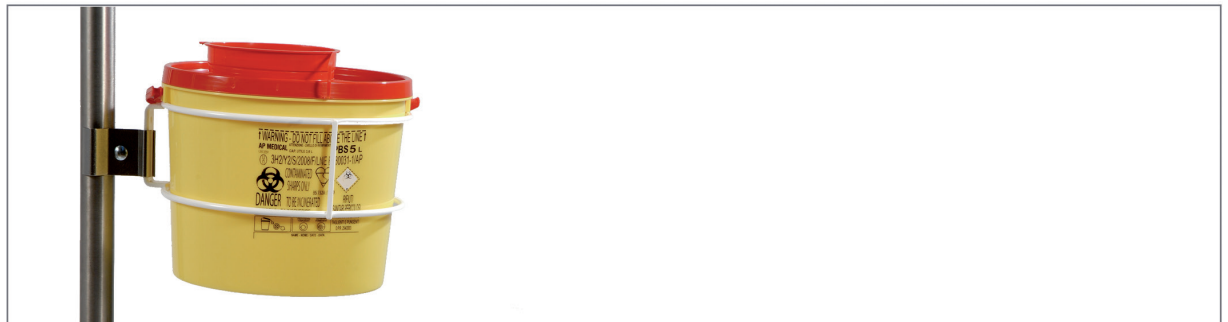

## VORTEILE:

- Sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben.
- Falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reißt die Lasche ab.
- Stich-und-schnittfest
- Mit Griff ausgestattet
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentnahme.
- Auf 134° autoklavierbar (mit Bewahrung der Eigenschaften des Gesetzes NFX 30-511)
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Endgültiger Verschluss
- Halterungen zur Verfügung
- Entsorgung bei Verbrennung, ohne giftigen Gase freizusetzen.

## SICHERHEITSVORSCHLÄGE:

- Verwenden Sie den Behälter nicht vor Montierung des Deckels
- Versuchen Sie nicht, die entsorgten Materialien nach der Entsorgung zu entnehmen
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge
- Verschiessen Sie den Behälter nur mit dem dazugehörigen Deckel
- Versuchen Sie nicht, den bereits endgültig verschlossenen Behälter wieder zu öffnen
- Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen
- Entsorgen Sie nach den geltenden Rechtsvorschriften
- Nutzen Sie den Griff zum Transport des Behälters