

miro-stretch transparent

unsteriler, transparenter Fixierfilm



miro-stretch transparent ist ein transparenter, vollflächig klebender Filmverband. Hautfreundlich durch luft- und wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial und gut hautverträglichen Polyacrylat-Kleber. Schnürt nicht ab und fixiert rutschsicher auf der Haut - idealer Sitz auch an schwierigen Gelenkstellen aufgrund hoher Flexibilität des PU-Films. Der Verband ist wasserdicht und erhöht den Patientenkomfort dadurch, dass mit ihm geduscht werden kann.

Die Trägerfolie der nicht bedruckten Seite hat einen Stanzschnitt, der das Ablösen der Folie vereinfacht.

Die bedruckte Schutzfolie weist einen wellenförmigen Stanzschnitt auf, der das Ablösen der Folie wesentlich erleichtert. Diese Schutzfolie ist transparent und vereinfacht ein gezieltes Aufbringen der Folie auf die zu fixierende Wundauflage, Kompresse etc. Entlang des grünen Rasters lassen sich Abschnitte der benötigten Größe besonders akkurat zuschneiden.

Anwendungsgebiete:

- zur Verband- und Kompressenfixierung
- zur Befestigung von Kathetern, Sonden, Schläuchen

Applikation:

Die Trägerfolie der matten Seite mit Hilfe des seitlichen Stanzschnittes entfernen. Die Klebefolie auf der Haut anbringen, dabei die Ecken und Kanten gut andrücken. Zuletzt die glänzende bedruckte Folie vom mittigen Wellenschnitt nach außen hin abziehen.

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
5cm	17105	02181112	ca. 10m	1 St.
10cm	17110	02181106	ca. 10m	1 St.
15cm	17115	02181098	ca. 10m	1 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: transparente PU Folie

Kleber: Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.

Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Keine Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen

Dehnung ca. (in %):

entfällt

Sterilisation:

unsteril

waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

CE

Zolltarifnummer:

3005.1000

Haltbarkeit:

5 Jahre

Klassifizierung:

I unsteril

Anhang:

I und VII,
nach RL 93/42 EWG

Regel:

1

**Produkt zum
einmaligen Gebrauch**

ja

miro Verbandstoffe GmbH

In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.