


Art. 483 Desinfizierende Reinigungstücher

Eigenschaften	Desinfizierende Reinigungstücher 483 sind eine alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen. Die verwendete Desinfektionslösung ist viruzid gegen gehüllte Viren wie z.B. HIV/HBC/HCV, Rotavirus, BVDV, Vaccinia, Influenza und Corona. Einfache und sichere Anwendung.
Einsatzgebiet	Zur Flächendesinfektion in allen Bereichen, Praxen, Schulen, Kindergärten und Industriebetrieben.
Vorteile	Desinfizierende Reinigungstücher 483 sind gebrauchsfertig, benetzen die Oberflächen gleichmäßig und bilden keine sichtbaren Rückstände. Die gute Materialverträglichkeit gestattet eine universelle Anwendung und schont dabei sensible Oberflächen wie Acrylglas oder Polycarbonatglas. Es wirkt reinigend und fettlösend.
Anwendung	Flächen und Gegenstände mit desinfizierenden Reinigungstüchern 483 gleichmäßig benetzen. Mindestens 1 Minute einwirken lassen und ggf. mit einem Tuch abwischen. Einwirkzeiten sind Mindestzeiten.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- 100 Tücher in Spenderdose- Tuch-Maße 130x150mm- getränkt mit alkoholfreier Schnelldesinfektionslösung- Med. BAuA Reg.Nr. N-87539
Artikelnummer	483.100.000 Desinfizierende Reinigungstücher Optional in kundenspezifischen Aufmachung (Privat Label) erhältlich

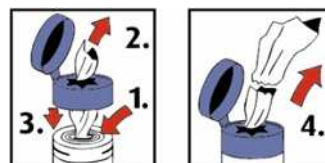

Anleitung: Öffnen Sie den Deckel der Dose, schneiden Sie den Beutel auf und lassen Sie die Tücher im Beutel. **Ziehen Sie das Tuch aus der Mitte der Rolle** durch das Verteilungsloch und schließen Sie den Deckel. Zur einfachen Verwendung eines einzelnen Tuches, ziehen Sie ein Tuch aus dem Deckel und reißen es in einem 90° Winkel ab und schließen Sie den Deckel nach dem Gebrauch wieder.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



ECS Cleaning Solutions GmbH • Wolfener Straße 32-34 • 12681 Berlin • Germany
Phone +49 (0)30 36464036 • Fax +49 (0)30 36464034 • www.elixclean.de • post@elixclean.de