

Technische Datenblätter

Änderung Nr. 05 vom 21/06/2018
Mod. 72_I1_DE

DISPO 1,5



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einweg Behälter für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen.

Modell entwickelt für Arbeitstationen, wo wenig Abfälle produziert werden (Pflegetablett, Wagen, Arztpraxis, Privathäuser)

- ▶ **Verschluss:** Ovale Öffnung
- ▶ **Rohstoff:** Umweltfreundlicher Kunststoff (Polypropylene Copolymer mit Cadmiumfreiem Masterbatch gefärbt)
- ▶ **Farbe:** Gelb
(Material mit schwermetallfreiem Masterbatch gefärbt)
(REACH-Konform)
- ▶ **Form:** Zylinderform
- ▶ **Gewicht:** 124 gr.
- ▶ **Maximale Befüllung:** 800 gr.
- ▶ **Volumen:** 1,500 Lt.
- ▶ **Aussenmass:** Ø 140 x 155 mm H (mit geschlossenem Deckel)



LOGISTISCHE DETAILS:

- ▶ **St pro Karton:** 100 St (mit geschlossenem Deckel)
- ▶ **Verpackungsmass:** 60x40x36 H cm
- ▶ **St pro Palette:** 2400 St
- ▶ **Palettenmass:** 120x80x228 H cm

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ▶ ADR Konform - UN Zulassung
- ▶ TRBA 250
- ▶ NFX 30-511
- ▶ Kite Mark: Konformität ISO 23907

ANWEISUNGEN:

► Montage:

Stark auf die Oberfläche des Deckels drücken, bis alle Raster eingehakt sind.



► Provisorischer Verschluss:

Der Behälter kann provisorisch geschlossen werden: man soll die kleine Lasche der Klappe an den Raster befestigen.

► Endgültiger Verschluss:

Der Behälter kann endgültig geschlossen werden: man soll die Klappe stark drücken.



GEBRAUCHANLEITUNGEN:

- Während des Gebrauchs, schliessen Sie den Deckel provisorisch.
- Wenn der Behälter voll ist, schliessen Sie den Deckel endgültig.

- Breite Öffnung für die Entsorgung verschiedener Abfalltypen, z.B. Teströhrchen, Skalpelln, u.s.w.
- Der Behälter kann auf 134° für 18' autoklaviert werden
- Wenn der Behälter voll ist, muss er verbrannt werden. Bei der Verbrennung werden keine giftigen Gase freigesetzt.

► Nadelentsorgung:

Benutzen Sie die "V" Einschnitte für die Nadelentfernung



Führen Sie den Pennadel schräg in den Blumeneinschnitt, sperren Sie den Stift mit einer Bewegung unten nach oben, dann abschrauben Sie.



ZUBEHÖRE:

- Saugnapfhalterung
- Tischtablette mit spezifischem Raum für Dispo 1
- Wandhalterung



VORTEILE:

- Sicher, einfach zu gebrauchen und zu handhaben.
- Falls Sie versuchen, den Behälter nach dem endgültigen Verschluss wieder zu öffnen, reißt die Lasche ab.
- Stich-und-schnittfest
- Mit Griff ausgestattet
- Deckel mit spezieller Öffnung für die Nadelentnahme.
- Auf 134° autoklavierbar (mit Bewahrung der Eigenschaften des Gesetzes NFX 30-500)
- Angabe der maximalen Füllungshöhe
- Endgültiger Verschluss
- Halterungen zur Verfügung
- Entsorgung bei Verbrennung, ohne giftigen Gase freizusetzen.

SICHERHEITSVORSCHLÄGE:

- Verwenden Sie den Behälter vor dem Aufbau nicht
- Versuchen Sie nicht, die entsorgten Materialien nach der Entsorgung zu entnehmen
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllungsmenge
- Verschiessen Sie den Behälter nur mit dem dazugehörigen Deckel
- Versuchen Sie nicht, den bereits endgültig verschlossenen Behälter wieder zu öffnen
- Folgen Sie den Sicherheitsanweisungen
- Entsorgen Sie nach den geltenden Rechtsvorschriften
- Nutzen Sie den Griff zum Transport des Behälters